

Vol.2

Edizione 09.22

STRUMENTARIO ODONTOIATRICO DI ALTA QUALITÀ

PRODONTO®
Signature
S E R I E S



Per **costruire l'eccellenza** del risultato terapeutico ad ogni gesto

PRODONTO

PR@D@NTO

Signature

S E R I E S



PRIMA DI TUTTO DOMANDIAMOCI COME VOGLIAMO LAVORARE.



4 Introduzione

8 Diagnostica

NEW

20 Conservativa

NEW

32 Conservativa Endo

38 Chirurgia

NEW

58 Implantologia

84 Parodontologia

NEW

89 Laboratorio

La nuova linea di strumentario Prodonto Signature nasce con uno scopo preciso: **permettere al clinico di operare al massimo del proprio potenziale.** Ogni aspetto del lavoro è fondamentale e gli strumenti che utilizziamo sono il tramite tra noi professionisti ed i risultati che ci aspettiamo.

OGGETTI PERFETTI.

PIÙ QUALITÀ = PIÙ RISULTATI

La professione è fatta di gesti che si ripetono di continuo. In ognuno di essi c'è esperienza, scienza, cura, maestria, fatica e soddisfazione. **Rendere ogni gesto migliore vuol dire rendere migliore la vostra professione.**



Cura artigianale



La linea Signature di Prodonto è la linea di strumentario di qualità superiore per i professionisti dell'odontoiatria. È prodotta in Italia, nella migliore tradizione della più fine produzione metallurgica di precisione. Si tratta di prodotti sviluppati e costruiti con la passione per l'eccellenza tipica degli artigiani del nostro Paese, ma con una importante vocazione ai processi di miglioramento continuo e assicurazione di qualità tipici della produzione industriale più avanzata.

Signature

S E R I E S



Precisione industriale




La massima qualità della linea Signature non è un lusso, è una necessità. Ogni professionista deve poter contare sempre sui propri strumenti, senza compromessi. La linea Prodonto Signature è pensata con la filosofia della "eccellenza quotidiana", un concetto che ci fa scegliere la soluzione migliore che sappia contemperare efficacia ed efficienza. Nel caso della linea Signature la linea di mezzo, per così dire, si trova sull'eccellenza qualitativa.

GESTI PERFETTI.

PIÙ EFFICACIA = RISULTATI MIGLIORI

I vostri strumenti sono il mezzo attraverso il quale le vostre abilità, la vostra preparazione, il vostro talento, si trasformano in un risultato terapeutico. **Scegliete gli strumenti. Scegliete il risultato.**

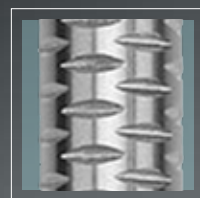


Signature

Facciamo un piccolo esempio di perfezione. **Il manico Dalila.**

Il manico Dalila è frutto di uno scrupoloso studio ergonomico abbinato a tecniche di lavorazione e materiali di altissimo livello. Le caratteristiche uniche di questa soluzione risiedono nella combinazione perfetta tra funzionalità, prestazioni in fase di sterilizzazione e qualità costruttiva. Il risultato è un manico che impiegato su diversi tipi di strumento consente un feeling uniforme permettendo quindi di esprimere al meglio l'efficacia del gesto.

- Una presa più sicura e confortevole
- Design innovativo
- Pulizia più veloce
- Sterilizzazione più semplice

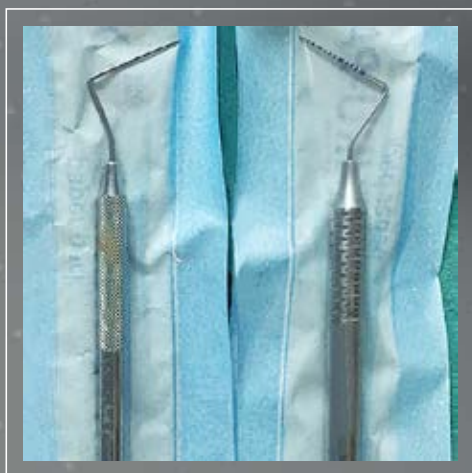

Alla prova dei fatti

Un semplice test di confronto evidenzia come, a parità di trattamento, gli strumenti con manico Dalila possono essere sterilizzati meglio e detersi in meno tempo.

Diagnostica

SPECCHIETTI

Signature




Perfetta stabilità in ogni
angolazione grazie al manico Dalila

1

Scegliete il manico

Forma, materiale e tipo di costruzione
influiscono sul modo in cui ognuno
di noi percepisce differenzialmente lo
strumento.

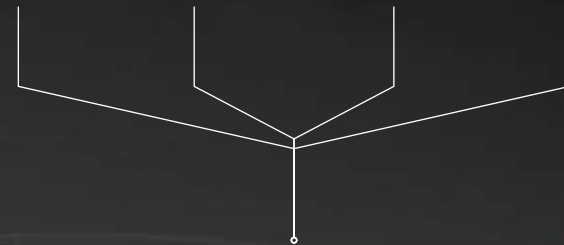


Gli specchietti sono disponibili
anche con rivestimento in rodio.



2

Scegliete il tipo di specchietto e le possibili opzioni

Abbinare al manico il tipo di specchietto ideale per il vostro modo di lavorare. Con forma a goccia o rotondo, può essere singolo o doppio.

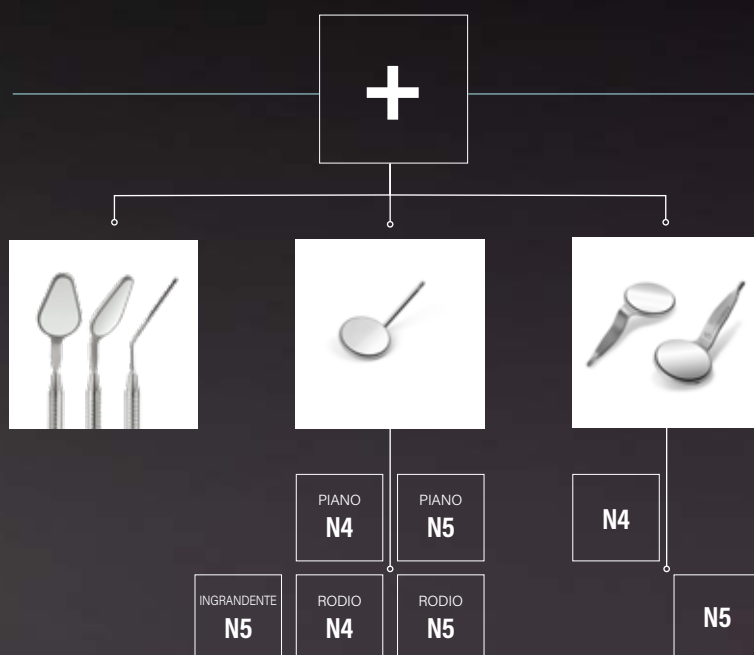


3

Diagnostica

MANICI PER SPECCHIETTI



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

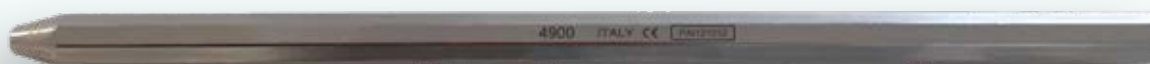

PRODO4900

Manico Specchietti Ottagonale



PRODO4905/6

Manico Specchietti 6 mm



PRODO4902

Manico specchietti light vuoto esagonale 8 mm



PRODO4905/8

Manico Specchietti 8 mm





Diagnostica

SPECCHIETTI



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PIANO
22mm



PRODO4903/4

Specchietti n.4 Piani
12 pezzi

PIANO
24mm



PRODO4903/5

Specchietti n.5 Piani
12 pezzi

PIANO
22mm

Rh₄₅




PRODO4903/4RO

Specchietti n.4 Rodio
12 pezzi

PIANO
24mm

Rh₄₅

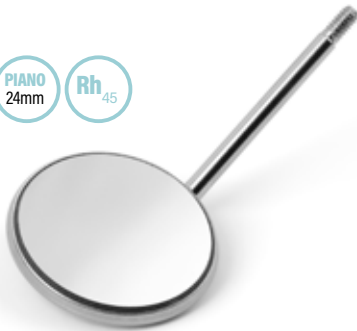

PRODO4903/5RO

Specchietti n.5 Rodio
12 pezzi

PIANO
24mm

Rh₄₅



PRODO4912/5RO

Specchi Doppi
Fronte e Retro / Rodio n.5
6 pezzi

PIANO
22mm

Rh₄₅



PRODO4912/4RO

Specchi Doppi
Fronte e Retro / Rodio n.4
6 pezzi

INGR.
24mm



PRODO4903/5MA

Specchietti n.5
Ingrandente - 12 pezzi

Diagnostica

SPECCHIETTI DR. COMELLA



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



SPECCHIETTO A GOCCIA

Lo specchietto odontoiatrico rappresenta lo strumento necessario per l'ispezione del cavo orale, dei tessuti molli, denti anteriori e posteriori e come protezione nelle manovre conservative. Una miglioria per tutte queste attività è ottenuta con l'introduzione del nuovo specchietto "a goccia" il quale agevola il controllo dei tessuti molli, protegge la lingua e offre una più ampia retrospettiva del versante vestibolare.

(Protetto da brevetto internazionale)

MAGGIORE LUMINOSITÀ

In aggiunta, il nuovo specchietto "a goccia" garantisce una maggior luce riflessa aumentando così la luminosità del cavo orale.

PRODO4903/10R0

Specchietto Dott. Comella Rodio.
6 pezzi





Diagnostica

SPECCHIETTI MICRO



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROSH34908/T

Specchietto micro
TONDO



PROSH34908/P

Specchietto micro
PRISMATICO



PROSH34908/Q

Specchietto micro
QUADRATO



Micro specchietto adatto per gli interventi di microchirurgia. La sua esclusiva finitura a specchio dell'acciaio inox permette di riflettere l'immagine in maniera precisa anche delle parti più piccole del cavo orale.



PROD03638

Porta Lama 135 mm
MICRO

Scegliete come lavorare al meglio

Gli strumenti di diagnostica sono chiamati a supportare il clinico nella fase più importante in cui la corretta valutazione influenza le scelte che verranno fatte da lì in avanti. Per questa ragione questi dispositivi devono assecondare le esigenze del medico e dello staff, essere in qualche modo, invisibili, ma determinanti. Si tratta di strumenti considerati, a torto, semplici, ma che rivestono un ruolo fondamentale perché sono i primi con cui entra in contatto il paziente, e molto spesso i più largamente utilizzati nella pratica quotidiana. Avere il perfetto controllo dei propri strumenti diagnostici grazie a superfici di contatto ottimizzate, poter contare su eccellenti performance durante la sterilizzazione rendono gli strumenti diagnostici Prodonto Signature la migliore scelta anche per i clinici più esigenti.

Pinzette medicazioni

College, Flagg, Perry

14

Pinzette

Meriam

14

Pinza Articolazioni Retta

14



Sonde parodontali

singole e doppie

15

Specilli

con manico cilindrico

16

Specilli doppi

con manico cilindrico

17



Componete il vostro kit ideale grazie all'ampia scelta di strumentario di alta qualità Prodonto Signature.



Riferimenti cromatici

Le punte sono marchiate con riferimenti colorati. È molto semplice riconoscere a colpo d'occhio ogni singolo modello.

Punti di presa ottimizzati

In base al tipo di strumento la zona di presa è studiata per offrire la migliore combinazione di sensibilità, precisione e stabilità nell'impugnatura.

PINZETTE MEDICAZIONI.



PROD01118

Pinzetta *College*
con fermo
150 mm



PROD01126

Pinzetta
College
150 mm



PROD01022/130

Pinzetta *Perry*
130 mm



PROD01024

Pinzetta
Meriam
160 mm



PROD01023

Pinzetta *Flagg*
150 mm



PROD01026

Pinzetta *College*
150 mm



PROD04583

Pinza Articolazioni
RETTA





Diagnostica

SONDE PARODONTALI MILLIMETRATE.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto


PRODO548/2PT

Sonda parodontale millimetrata 2PT CP11




PRODO 548/3PT

Sonda parodontale millimetrata 3PT CP12 UNC University of North Carolina

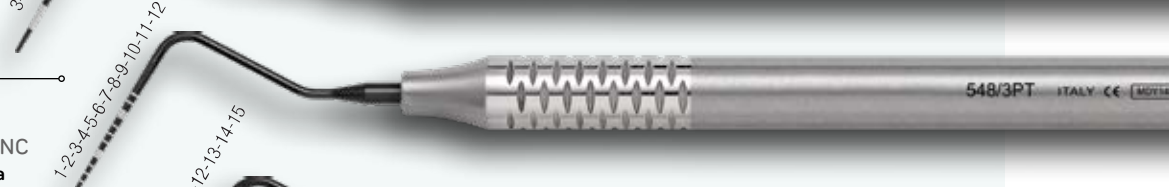

PRODO 548/4PT

Sonda parodontale millimetrata 4PT CP15 UNC University of North Carolina

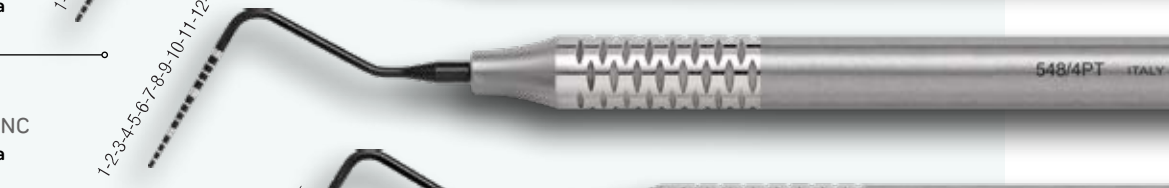

PRODO548/5PT

Sonda parodontale millimetrata 5PT WHO



Sonde parodontali con rivestimento tecnico Black DLC (*Diamond Like Carbon*)

- Base nera per elevare il contrasto di lettura
- Punta arrotondata per non creare traumi
- Scala metrica precisa realizzata a laser
- Scala metrica non traumatica per assenza scanalature
- Non scolora



Diagnostica

SONDE PARODONTALI.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PRODO569/2

Sonda Nabers 2N



PRODO569/2-COL

Sonda Nabers 2N Colore



PRODO546/1

Sonda Parodontale Williams



PRODO546/4

Sonda Parodontale Goldman-Fox



PRODO555HL8/8A

Sonda Manico Anatomico N.8A ø 8 MM

SPECILLI.



n. 11

PROD0555HL8/11
Specillo n. 11
Manico anatomico Ø 8 mm



n. 12

PROD0555HL8/12
Specillo n. 12
Manico anatomico Ø 8 mm



n. 16

PROD0555HL8/16
Specillo n. 16
Manico anatomico Ø 8 mm



n. 2

PROD0555HL8/2
Specillo n. 2
Manico anatomico Ø 8 mm



n. 23

PROD0555HL8/23
Specillo n. 23
Manico anatomico Ø 8 mm



n. 6

PROD0555HL8/6
Specillo n. 6
Manico anatomico Ø 8 mm



n. 8

PROD0555HL8/8
Specillo n. 8
Manico anatomico Ø 8 mm



n. 9

PROD0555HL8/9
Specillo n. 9
Manico anatomico Ø 8 mm



n. 3A

PROD0555HL8/3A
Specillo 3A
Manico anatomico Ø 8 mm



Diagnostica

SPECILLI DOPPI.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

Nuovo micro-specillo doppio con pieghe stile Gracey 11-12, ideale per diagnosi parodontale in calcoli subgingivali e tasche profonde.



PRODO556/11-12

Specillo Doppio n. 11-12



PRODO560HL8/1

Specillo Doppio Inox n. 23/17



PRODO565/1

Specillo Endodontico DG 6/6A



PRODO567/23

Specillo Doppio Williams n. 23



Conservativa

ESCAVATORI, OTTURATORI E SPATOLE

Signature

Scegliete come lavorare al meglio

Gli strumenti di diagnostica sono chiamati a supportare il clinico nella fase più importante in cui la corretta valutazione influenza le scelte che verranno fatte da lì in avanti. Per questa ragione questi dispositivi devono assecondare le esigenze del medico e dello staff, essere in qualche modo, invisibili, ma determinanti. Si tratta di strumenti considerati, a torto, semplici, ma che rivestono un ruolo fondamentale perché sono i primi con cui entra in contatto il paziente, e molto spesso i più largamente utilizzati nella pratica quotidiana. Avere il perfetto controllo dei propri strumenti diagnostici grazie a superfici di contatto ottimizzate, poter contare su eccellenti performance durante la sterilizzazione rendono gli strumenti diagnostici Prodonto Signature la migliore scelta anche per i clinici più esigenti.

Escavatori

Curette Gracey

20

Martello leva corone

21

Otturatori

22

Pinza per corone universale

22

Spatole

spatole Heidemann

24

Strumenti per composito

BS, SS, Goldensteinn

25

Strumenti filo retrattore

universale, tondo e applicatore di sottofondo

26


Pinza fora diga


kit per diga

27

Uncini per diga

28

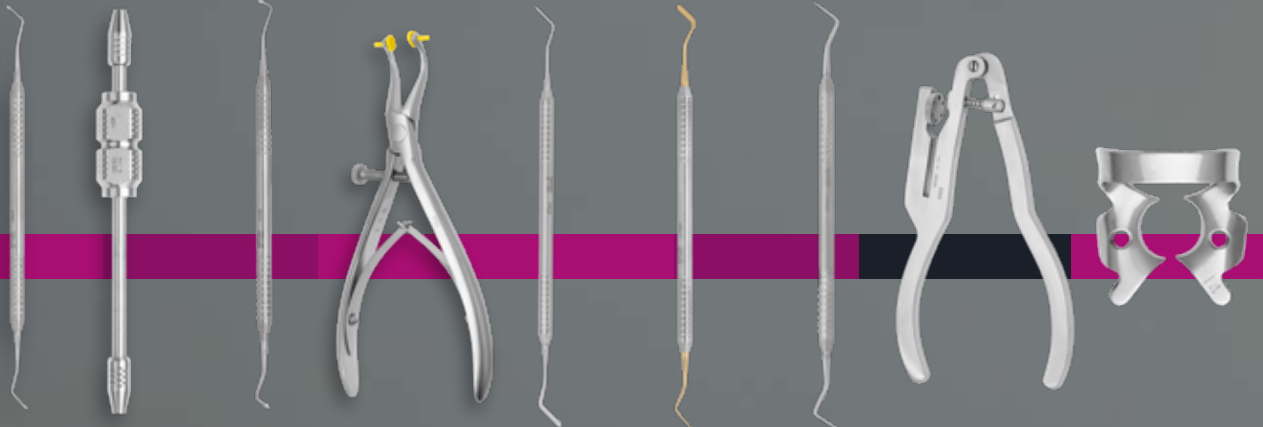

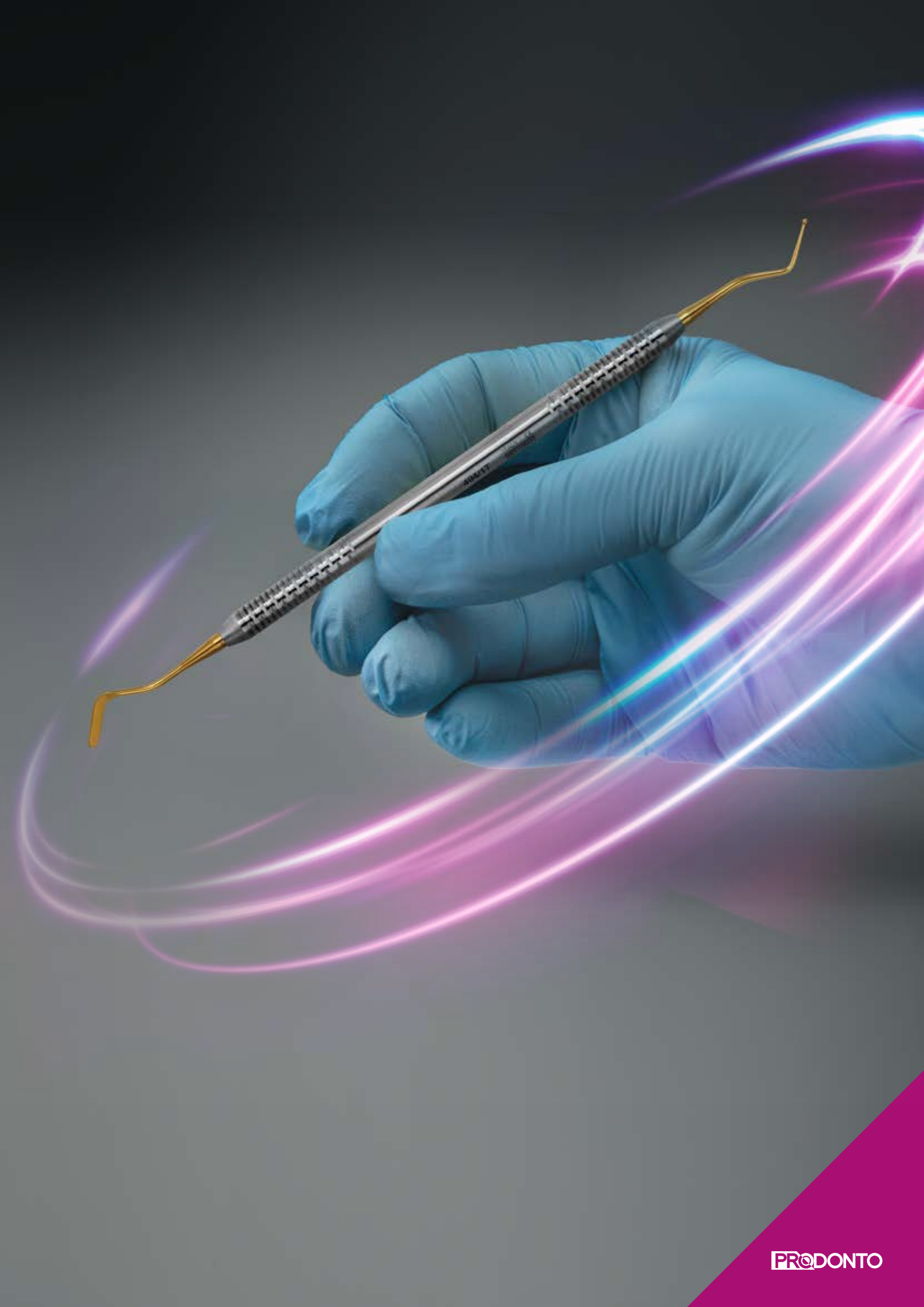

Conservativa

ESCAVATORI.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



0,8 mm

NEW



PROD0670/0

1,2 mm

NEW



PROD0670/1

1,4 mm

NEW



PROD0670/2

1,6 mm

NEW



PROD0670/3



PROD0664/17



PROSD0664/18



PROD0664/19



PROD0663/17



PROSD0663/18



PROD0663/19





Conservativa

MARTELLINO LEVA CORONE.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PRODO4571

Leva corone manuale: di tipo a "martello scorrevole" che agganciato alla corona da rimuovere, trasmette una forza di impatto alla corona senza colpire l'oggetto stesso. le punte possono essere montate su entrambi i lati del levacorone.



PRODO4571/1

Punta a doppia curva per zone difficilmente raggiungibili.



PRODO4571/2

Punta sottile e angolata per unità multiple.



PROSDO4571/3

Punta singola.

OTTURATORI.



Utilizzatli in qualsiasi comune tecnica di otturazione per la rifinitura del margine del lavoro di restauro e del riempimento in materiale plastico.



PROD0521/1

Otturatore brunitore
Westcott
N.21



PROD0500/1

Otturatore
a sfera
OT1



PROD0500/2

Otturatore
a sfera
OT2



PROD0500/3

Otturatore
a sfera
OT3



PROD0500/3

Otturatore
a sfera
OT4



PROD0527/1

Otturatore
M1



PROD0527/2

Otturatore
M2



PROD0527/3

Otturatore
M3



PROSD0475/18

Otturatore ball
n.18



PROSD0475/28

Otturatore ball
n.26/275




Conservativa

PINZA PER CORONE UNIVERSALE.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

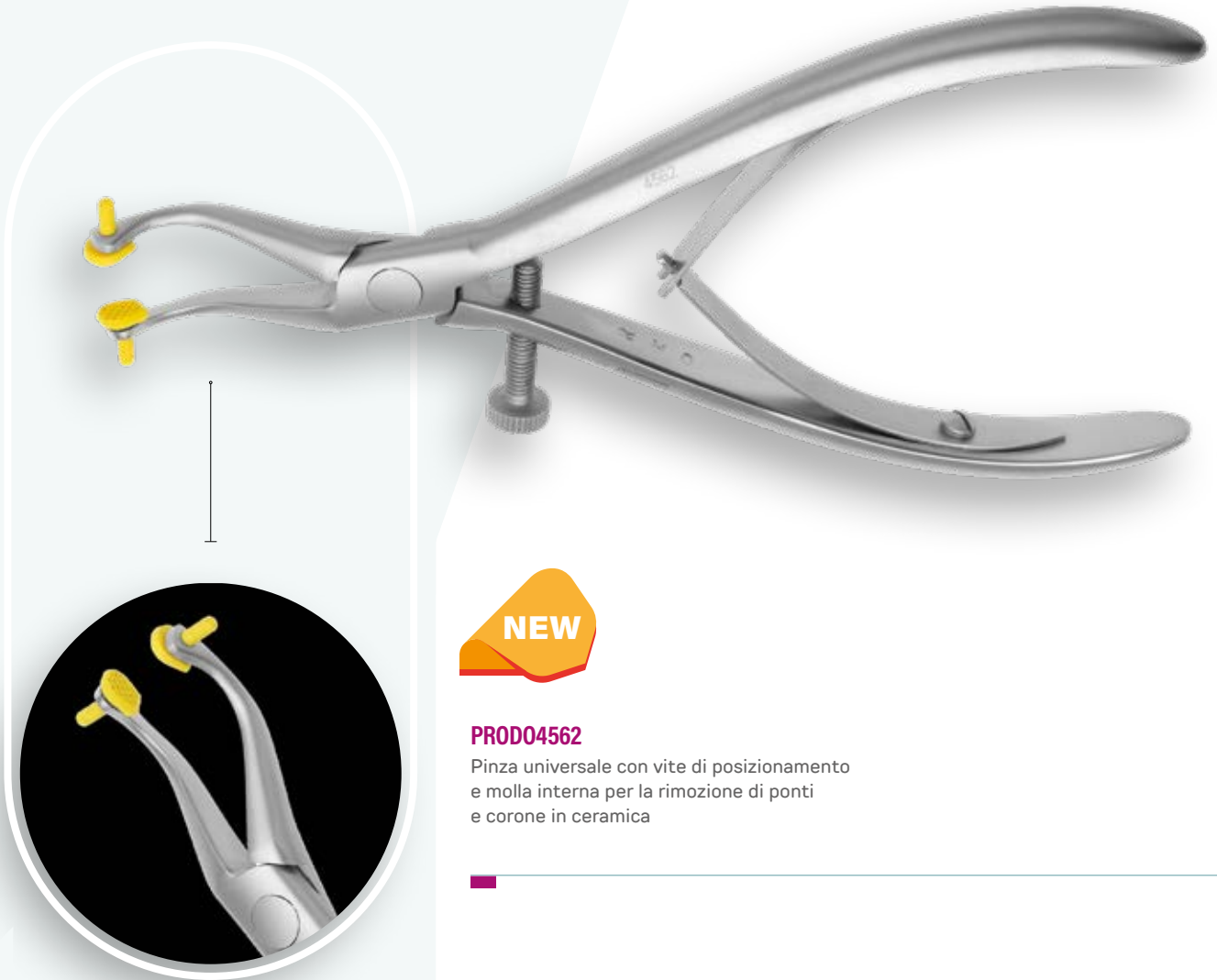

PROD04562

Pinza universale con vite di posizionamento e molla interna per la rimozione di ponti e corone in ceramica

PROSD04562/1

GOMMINI RICAMBIO (pz6)

3 paia di inserti in plastica autoclavabili fino a 180°C per la rimozione di corone e ponti per una presa migliore, utilizzare le punte di gomma e polvere di smeriglio.



Particolare gommini di ricambio

Conservativa

SPATOLE.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

Spatola Heidemann anatomica

Utilizzateo in qualsiasi comune tecnica di otturazione per la rifinitura del margine del lavoro di restauro e del riempimento in materiale plastico.



PROD0579/1

Spatola anatomina *Heidemann*
N.1



PROD0579/2

Spatola anatomina *Heidemann*
N.2



PROD0579/3

Spatola anatomina *Heidemann*
N.3





Conservativa

STRUMENTI PER COMPOSITO.

Utilizzati in qualsiasi comune tecnica di otturazione per la rifinitura del margine del lavoro di restauro e del riempimento in materiale plastico.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

Strumenti per composito BS



**PROSD0494/
1T.HL8**

BS1

**PROSD0494/
2T.HL8**

BS2

**PROSD0494/
3T.HL8**

BS3



Strumenti per composito SS



**PROSD0518/
1.THL8**

SS1

**PROSD0518/
2.THL8**

SS2

**PROSD0518/
3.THL8**

SS3



Strumenti per composito GOLDENSTEINN



**PROSD0492/
1.THL8**

GOLDENSTEINN 1

**PROSD0492/
2.THL8**

GOLDENSTEINN 2

**PROSD0492/
3.THL8**

GOLDENSTEINN 3

**PROSD0492/
4.THL8**

GOLDENSTEINN 4



Conservativa

APPLICATORE DI SOTTOFONDO.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

NEW



PROSD0582

Strumento di riporto (applicatore per dycal) utilizzato in qualsiasi comune tecnica di otturazione per posizionare idrossido di calcio.

STRUMENTO FILO RETRATTORE UNIVERSALE.

NEW



PROSD0585/81

Universale per posizionare il filo retrattore nel solco intorno al dente.

STRUMENTO FILO RETRATTORE TONDO.

NEW



PROSD0585/MSY

Per posizionare il filo retrattore nel solco intorno al dente.



Conservativa

KIT DIGA.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto




PROB85550

Pinza Fora Diga *Tipo Ivory*
Per posizionare il filo retrattore nel solco intorno al dente.



PROB85551

Pinza per uncini
Tipo Ivory

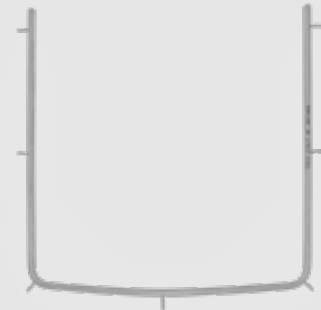


PROB85553

Telaio Tendi Diga
110 mm



PROB81675/10

Kit Rubber Dam per
UNCINI - PINZE - TELAI

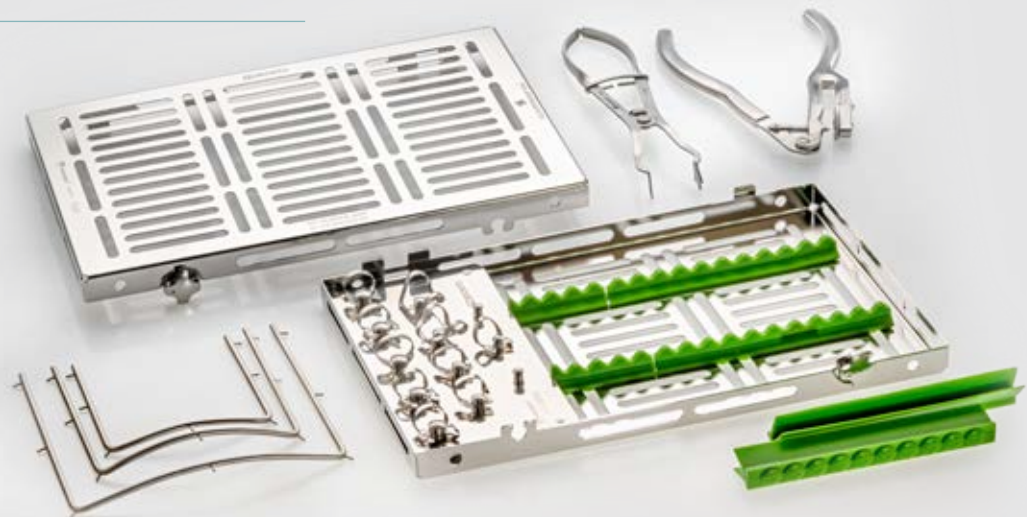

Il Kit contiene:

- 981/20 Gammafix tray Cinc
- 5550 Pinza Fora Diga
- 5551 Pinza per uncini
- 5552 Telaio Tendi Diga
- 5553 Telaio Tendi Diga
- 5554 Telaio Tendi Diga
- 5595/00 Uncino per Diga N. 00
- 5595/3 Uncino per Diga N. 3
- 5595/4 Uncino per Diga N. 4
- 5595/12A Uncino per Diga N. 12A
- 5595/13A Uncino per Diga N. 13A
- 5595/27 Uncino per Diga N. 27
- 5595/29 Uncino per Diga N. 29
- 5595/210 Uncino per Diga N. 210
- 5595/212 Uncino per Diga N. 212
- 5595/W8A Uncino per Diga N. W8A
- 5605 Piastra porta uncini
- 5610/M-V Diga in lattice (non mostrata)

Conservativa

UNCINI PER DIGA.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



NEW



PROB85595/14
Unico per diga n°14



NEW



PROB85595/210
Unico per diga n°210



NEW



PROB85595/212
Unico per diga n°212



NEW



PROB85595/2A
Unico per diga n°2A



NEW



PROB85595/9
Unico per diga n°9



NEW



PROB85595/0
Unico per diga n°0



NEW



PROB85595/00
Unico per diga n°00



NEW



PROB85595/1
Unico per diga n°1



NEW



PROB85595/12A
Unico per diga n°12A



NEW



PROB85595/13A
Unico per diga n°13A




















Conservativa
















UNCINI PER DIGA.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



				
				
PROB85595/14A	PROB85595/27	PROB85595/28	PROB85595/29	PROB85595/3
Unico per diga n°14A	Unico per diga n°27	Unico per diga n°28	Unico per diga n°29	Unico per diga n°3
				

				
				
PROB85595/4	PROB85595/7	PROB85595/8	PROB85595/8A	PROB85595/W8A
Unico per diga n°4	Unico per diga n°7	Unico per diga n°8	Unico per diga n°8A	Unico per diga n°W8A
				



Conservativa Endo

PLUGGER, SPREADER E ESCAVATORI

Signature

Plugger Endodontici
ISO 40-50-60-80-100
34



Spreader Endodontici
ISO20-30-40-50-60
35



Spreader Endodontici
ISO 40-50-60
36



Escavatori Endodontici
ISO 40-50-60
36



Pinza Endodontica
37



Stecca Endodontica
37





Conservativa Endo

PLUGGER ENDODONTICI.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



NEW

PROD0542/2.C6

ISO 40



NEW

PROD0542/3.C6

ISO 50



NEW

PROD0542/4.C6

ISO 60



NEW

PROD0542/5.C6

ISO 80



NEW

PROD0542/6.C6

ISO 100



PROD0726/SET

Kit Plugger Endodontici

Contiene un pezzo per tipo di:

- 542/2.C6 iso 40
- 542/3.C6 iso 50
- 542/4.C6 iso 60
- 542/5.C6 iso 80
- 542/6.C6 iso 100
- 977 vassoio inox piccolo





Conservativa Endo

SPREADER ENDODONTICI.

Spreader: si riconosce per la punta aguzza e stelo piegato in varie gradazioni. Le metodologie di applicazione più comuni sono: uso a freddo la cui funzione è di compattare lateralmente il cono master di guttaperca contro la parete del canale endodontico ricavando lo spazio per introdurre i coni accessori; porta calore la cui funzione è appunto di portare calore nel canale endodontico per mezzo della punta precedentemente scaldata.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROD0543/1.C6

ISO 20



PROD0543/2.C6

ISO 30



PROD0543/3.C6

ISO 40



PROD0543/4.C6

ISO 50



PROD0543/5.C6

ISO 60




PROD0726/SET

Kit Spreaders Endodontici

Il kit comprende un pratico vassoio per sterilizzazione in acciaio inox e 5 spreaders endodontici a misure iso contenente:

- 542/1.C6 iso 20
- 542/2.C6 iso 30
- 542/3.C6 iso 40
- 542/4.C6 iso 50
- 542/5.C6 iso 60
- 977 vassoio inox piccolo

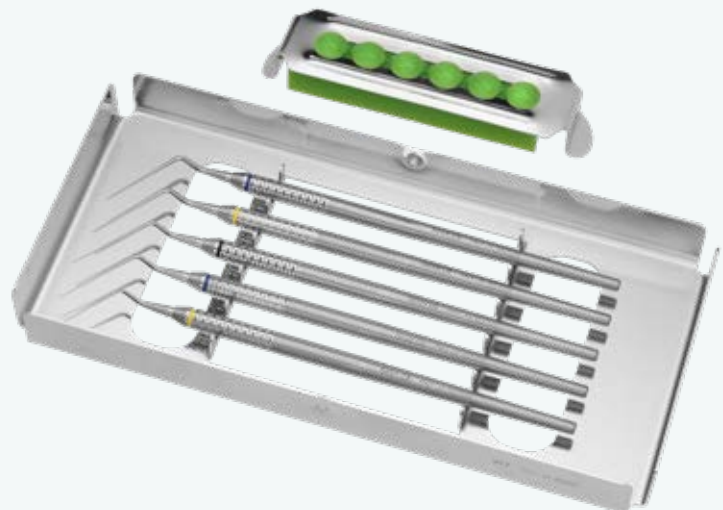

Conservativa Endo

SPREADER ENDODONTICI.

Spreader: si riconosce per la punta aguzza e stelo piegato in varie gradazioni. Le metodologie di applicazione più comuni sono: uso a freddo la cui funzione è di compattare lateralmente il cono master di guttaperca contro la parete del canale endodontico ricavando lo spazio per introdurre i coni accessori; porta calore la cui funzione è appunto di portare calore nel canale endodontico per mezzo della punta precedentemente scaldata.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROSD0539/1

ISO 40



PROSD0539/2

ISO 50



PROSD0539/3

ISO 60



ESCAVATORI ENDODONTICI.

Escavatore endodontico per la rimozione della dentina per il taglio e la rimozione della dentina cariata di un dente.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROSD0665/31

ISO 40




PROSD0665/32

ISO 50



PROSD0665/33

ISO 60

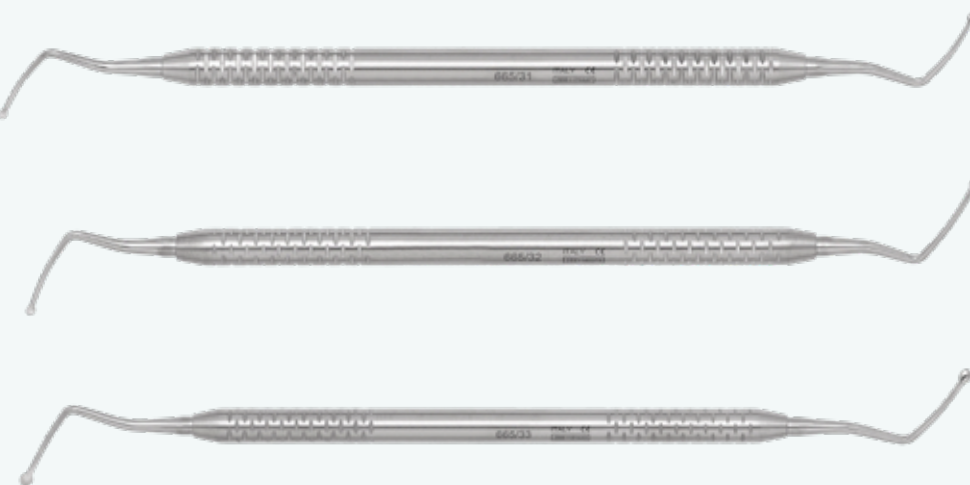



Conservativa Endo

PINZA ENDODONTICA.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROSD02168

Pinza per rimuovere strumenti canalari rotti dalla profondità nel canale. la lunghezza totale delle punte è di 20 mm con un diametro di 0.8 mm. La speciale zigrinatura con angoli acuti assicura una presa perfetta del frammento o della punta, all'interno del canale. La lunghezza totale della parte zigrinata è di 5 mm.



STECCA ENDODONTICA.



PROSD06170


Misuratore strumenti canalari



Signature


Pinze per estrazione di denti e radici

La gamma di pinze Prodonto Signature è composta da un set di pinze di forma inglese di altissima qualità per estrazione del dente dall'osso alveolare. Per gli ottavi inclusi la gamma si completa della eccellente pinza del dottor Comella (brevettata) che offre risultati eccellenti anche in condizioni operative non ottimali.



Pinze estrazione in sedici varianti

20

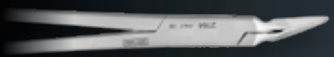


Pinze estrazione frammenti

21



Pinze estrazione Dr. Comella Brevettate


22



inoltre in questa sezione


Scollaperiostio

23

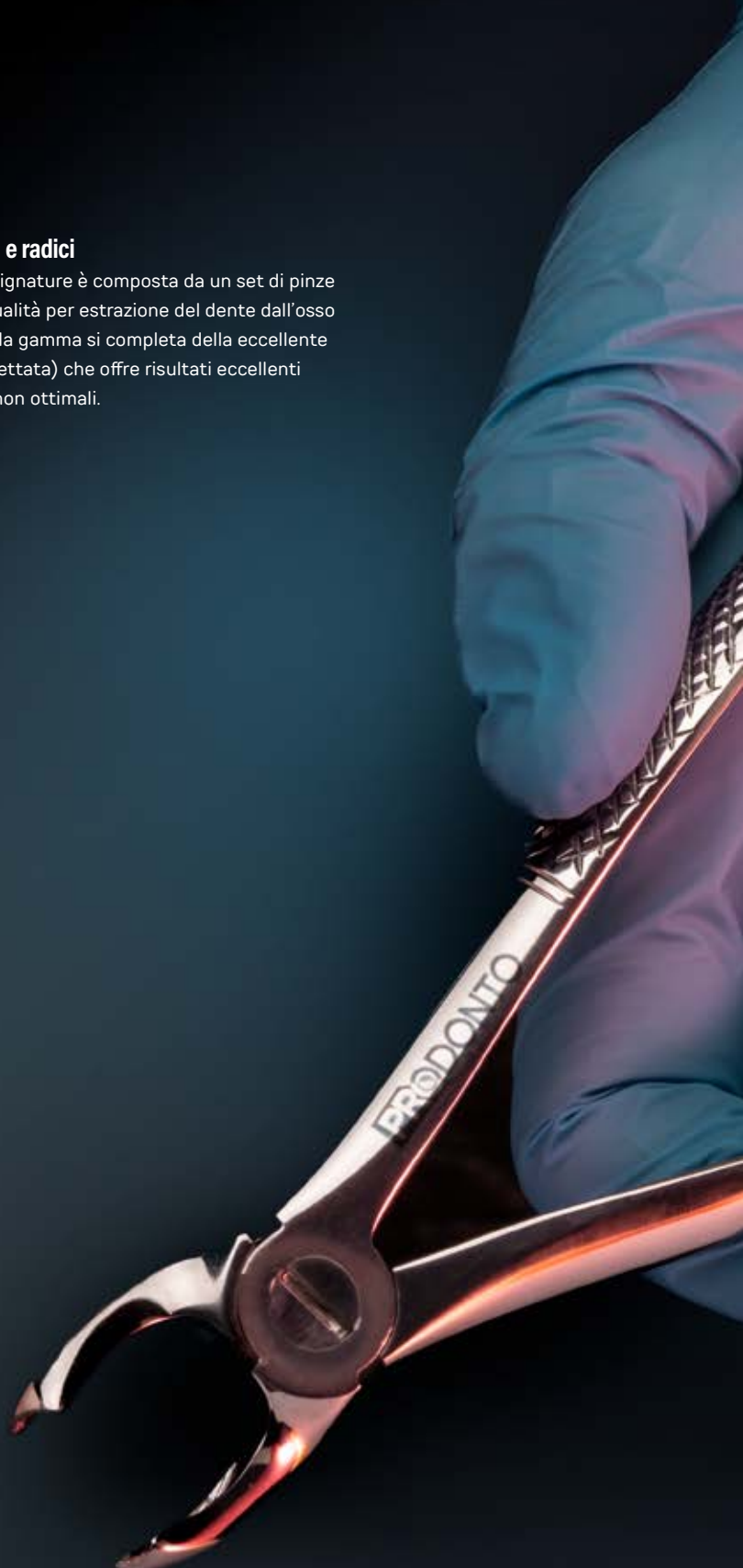



Pinze estrazione tabella applicazioni

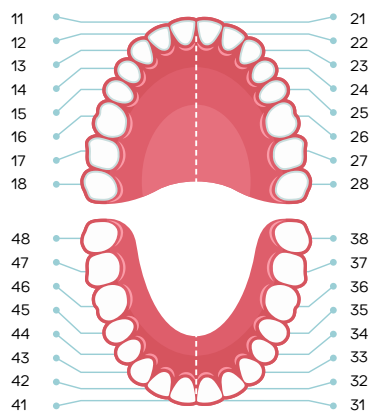

	Centrali e canini		Premolari		Molari		Radici		Denti del giudizio		Pagina
	I	S	I	S	I	S	I	S	I	S	
PROD02500/1		■									20
PROD02500/13			■								20
PROD02500/46							■				20
PROD02500/17						■					20
PROD02500/18						■					20
PROD02500/22					■						20
PROD02500/33							■				20
PROD02500/4											20
PROD02500/51A								■			20
PROD02500/67A						■				■	20
PROD02500/7				■							20
PROD02500/79						■			■		20
PROD02500/86C						■					20
PROD02400/70									■		22



Chirurgia

PINZE ESTRAZIONE DENTI SUPERIORI.



Inquadra con il tuo
tablet o smartphone
o clicca sul codice per
accedere alla pagina
prodotto



PRODO2500/1
Pinza estrazione n. 1
**INCISIVI CENTRALI
CANINI SUPERIORI**

PRODO2500/7
Pinza estrazione n. 7
PREMOLARI SUPERIORI

PRODO2500/17
Pinza estrazione n. 17
**MOLARI SUPERIORI
DESTRI**

PRODO2500/18
Pinza estrazione n. 18
**MOLARI SUOERIORI
SINISTRI**

PRODO2500/67A
Pinza estrazione n. 67A
OTTAVI SUPERIORI

PRODO2500/51A
Pinza estrazione n. 51A
RADICI SUPERIORI





PINZE ESTRAZIONE DENTI INFERIORI.



Inquadra con il tuo
tablet o smartphone
o clicca sul codice per
accedere alla pagina
prodotto



PROD02500/4

Pinza estrazione n. 4
**INCISIVI E CANINI
INFERIORI**

PROD02500/13

Pinza estrazione n. 13
PREMOLARI INFERIORI

PROD02500/22

Pinza estrazione n. 22
MOLARI INFERIORI

PROD02500/33

Pinza estrazione n. 33
RADICI INFERIORI

PROD02500/86C

Pinza estrazione n. 86/C
**MOLARI INFERIORI
SCORONATI**

PROD02500/79

Pinza estrazione n. 79
OTTAVI INFERIORI

PROD02500/46

Pinza estrazione n. 46
RADICI INFERIORI



Chirurgia

PINZE ESTRAZIONE.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROD02500/SET-12

Set essenziale di pinze per estrazione composto da 12 pezzi



Contiene

- PROD02500/2
- PROD02500/13
- PROD02500/33
- PROD02500/51
- PROD02500/7
- PROD02500/79
- PROD02500/17
- PROD02500/18
- PROD02500/22
- PROD02500/67
- PROD02500/74
- PROD02500/86


PINZE PER FRAMMENTI.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROD02164

Pinza per frammenti
CURVA

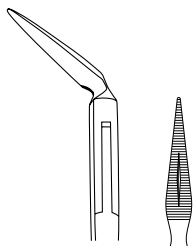

Signature



Strumentario odontoiatrico Prodonto Signature Series

Chirurgia

PINZE ESTRAZIONE DR COMELLA.



Inquadra con il tuo
tablet o smartphone
o clicca sul codice per
accedere alla pagina
prodotto



PRODO2400/70

Pinza Estrazione Dr. Comella




La pinza del Dr. Comella è stata sviluppata specificatamente per l'estrazione delle radici e frammenti dell'ottavo incluso. Nella pratica odontoiatrica, l'estrazione di un ottavo incluso richiede una precisione assoluta, essendo di fatto un intervento tra i più delicati. Particolarità di questa pinza è la possibilità di estrarre anche le radici che risultano meno accessibili con l'ausilio di strumenti tradizionali: in particolare l'uso delle leve può provocare lacerazioni dei tessuti molli adiacenti con interessamento (nei casi più estremi) del nervo linguale. La pinza del Dr. Comella offre una presa sicura, preservando i tessuti adiacenti. (Protetta da Brevetto Internazionale)

CASO CLINICO: ESTRAZIONE DEL TERZO MOLARE INFERIORE IN INCLUSIONE ORIZZONTALE



Sezione completa della corona

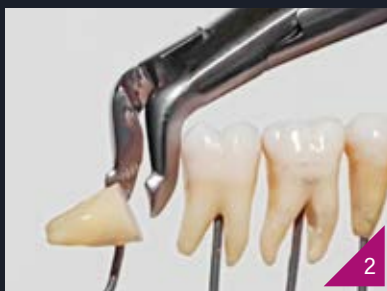

Accesso al sito estrattivo



Presca radicolare dente incluso



Chirurgia

SCOLLAPERIOSTIO.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROD0882

Scollaperiostio *Molt* n.9



PROD0878

Scollaperiostio *Prichard*



PROH3852/HP3

Scollaperiostio HP3



PROH3872/P14

Scollaperiostio inox *Goldam Fox*



PROH3873/PH2

Scollaperiostio *Hourigan*



Scollaperiostei in manico pieno, con 2 parti piatte, lunghezza 170 mm.
A vantaggio dell'utilizzatore per una miglior percezione e presa dello strumento.

Leve per radici e frammenti

La gamma di strumenti Prodonto Signature è composta da un set di leve idonee ad ogni situazione operativa e alle diverse sensibilità di ogni professionista. Grazie al diverso design di punta e manico è possibile infatti scegliere lo strumento ideale per le proprie esigenze. Per le gamme di leve e leve lussatore sono disponibili anche pratici kit completi con sei referenze ciascuno.

Leve per radici
in 6 misure + kit

26



Leve per radici lussatore
in sei misure + kit

27



Leva Bein
tonda

28



Leva Cryer
destra e sinistra

28



Leve per radici Flohr
destra e sinistra

29



Leve per radici Coupland
in tre misure

29



Leve per radici
Heidbrink Mini

30



Leve per radici
Heidbrink Apical.

30



I vostri strumenti sono il mezzo attraverso il quale le vostre abilità, la vostra preparazione, il vostro talento, si trasformano in un risultato terapeutico. **Scegliete gli strumenti. Scegliete il risultato.**



Punte per ogni esigenza

pensate con forme e lavorazioni superficiali adatte ad ogni situazione.



Superfici lineari e levigate

per maggior comfort d'uso e praticità di pulizia.

Impugnatura ergonomica

che consente una presa salda dello strumento e permette di dosare lo sforzo in modo controllato.

LEVE PER RADICI.

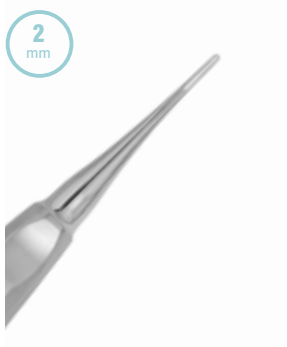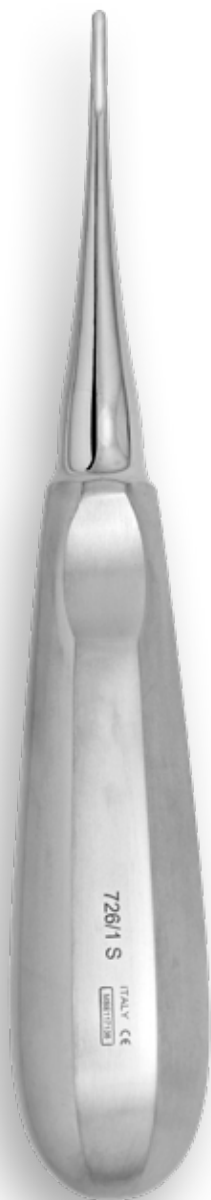

PROD0726/1S
Leva per radici 2 mm



PROD0726/2S
Leva per radici 2,5 mm



PROD0726/3S
Leva per radici 3 mm



PROD0726/4S
Leva per radici 3,5 mm



PROD0726/5S
Leva per radici 4 mm



PROD0726/6S
Leva per radici 4,5 mm

Scopri il Set da 6 pezzi di Leve per radici
Vedi **pagina 50**





Chirurgia

LEVE PER RADICI LUSSATORE.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROD0730/3S

Leva lussatore 3 mm
RETTA



PROD0730/4S

Leva lussatore 4 mm
RETTA



PROD0730/5S

Leva lussatore 5 mm
RETTA



PROD0730/3C

Leva lussatore 3 mm
CURVA



PROD0730/4C

Leva lussatore 4 mm
CURVA



PROD0730/5C

Leva lussatore 5 mm
CURVA

Leva che possiede una lama estremamente piatta e tagliente, permette una precisa penetrazione e taglio del ligamento periodontale. Il vantaggio del Lussatore risiede nella diminuzione dei traumi esercitati sui denti e gengive ed in molti casi esclude la necessità dell'uso delle tenaglie per estrazione.

Scopri il Set da 6 pezzi di Leve per radici

Vedi **pagina 50**



Chirurgia

SET LEVE PER RADICI.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROD0726/SET

Set leve per radici, contiene 6 pezzi, tipo retto.

Contiene un pezzo per tipo di:

- PROD0726/2S
- PROD0726/3S
- PROD0726/4S
- PROD0726/2C
- PROD0726/3C
- PROD0726/4C



SET LEVE PER RADICI LUSSATORE.

PROD0730/SET

Set leve lussatore, contiene 6 pezzi, tipo curvo e retto.

Contiene/Contains:

- PROD0730/3S
- PROD0730/3C
- PROD0730/4S
- PROD0730/4C
- PROD0730/5S
- PROD0730/5C






Chirurgia

LEVE PER RADICI CURVE.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

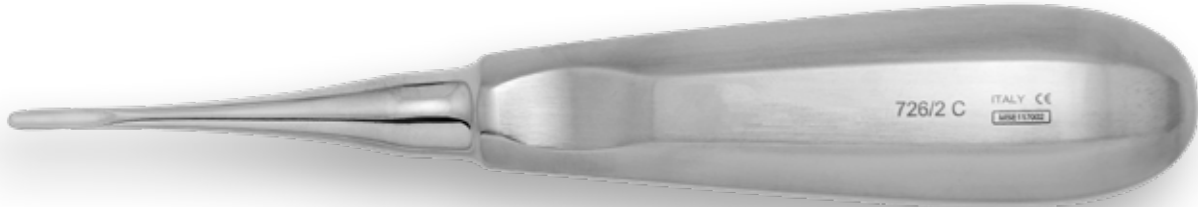

PROSH3726/1C

Leva per radici 2 mm



PROSH3726/2C

Leva per radici 2,5 mm



PROSH3726/3C

Leva per radici 3 mm



PROSH3726/4C

Leva per radici 3,5 mm



PROSH3726/5C

Leva per radici 4 mm




PROSH3726/6C

Leva per radici 4,5 mm

LEVE PER RADICI.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

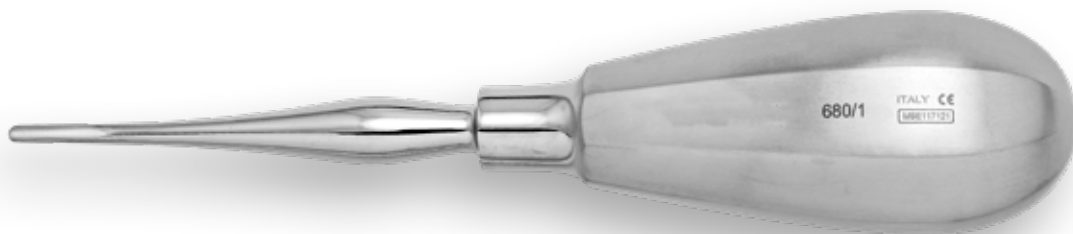

PRODO680/1

Leva *Bein* tonda 2 mm



2 mm

PRODO680/2

Leva *Bein* tonda 3 mm




3 mm

PRODO680/3

Leva *Bein* tonda 4 mm



4 mm

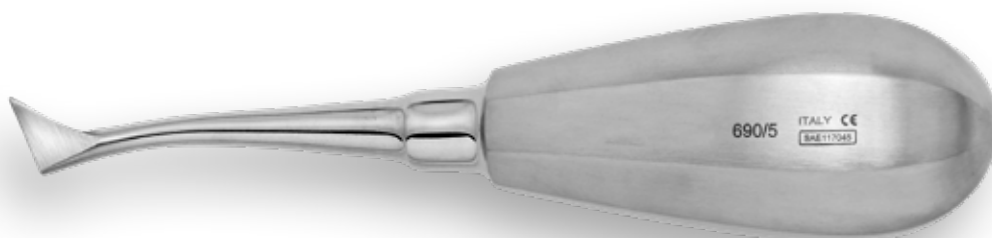

SX
←

PRODO690/5

Leva *Cryer* Sinistra



DX
→

PRODO690/6

Leva *Cryer* Destra



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



Chirurgia

LEVE PER RADICI.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



SX
←



PROD0720/10

Leva Schmeckebeier
Sinistra 3 mm

DX
→




PROD0720/11

Leva Schmeckebeier
Destra 3 mm



LEVE PER RADICI *COUPLAND*.

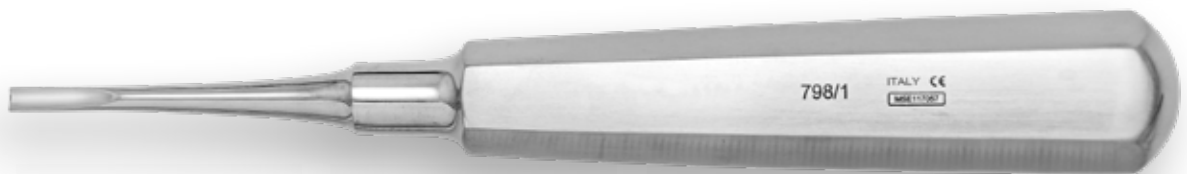

3
mm



PROD0798/1

Leva Coupland 3 mm

3,6
mm



PROD0798/2

Leva Coupland 3,6 mm

4,2
mm



PROD0798/3

Leva Coupland 4,2 mm



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



Chirurgia

LEVE PER RADICI HEIDBRINK MINI.



Inquadra con il tuo
tablet o smartphone
o clicca sul codice per
accedere alla pagina
prodotto



PROD0700/8

Leva Heidbrink



PROD0700/9

Leva Heidbrink Sinistra



PROD0700/10

Leva Heidbrink Destra

LEVE PER RADICI HEIDBRINK APICAL.



Inquadra con il tuo
tablet o smartphone
o clicca sul codice per
accedere alla pagina
prodotto



1,5
mm

PROD0705/4

Heidbrink Apical 1,5 mm manico vuoto




Chirurgia

DIVARICATORI



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

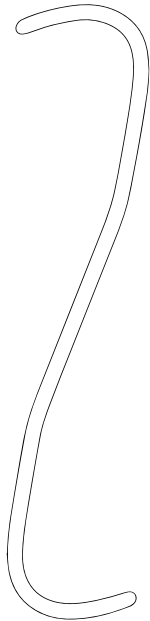

140 mm

per guance



120 mm

PROD0890/1

Divaricatore Sternberg N.1

PROD0896

Divaricatore Farabeuf - 2pz


per guance e tessuti



30x10 mm

PROD0888/1

Divaricatore Langenbeck n.1

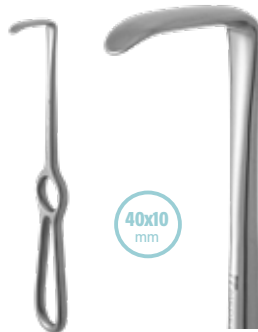

40x10 mm

PROD0888/2

Divaricatore Langenbeck n.2



40x13 mm

PROD0888/3

Divaricatore Langenbeck n.3

Chirurgia

IMPLANTOLOGIA.

Signature

Vista la crescente attenzione del mondo odontoiatrico per l'implantologia abbiamo deciso di includere una intera linea di strumenti ad essa dedicata. Le caratteristiche di eccellenza Signature fanno quindi la differenza per chi ricerca risultati della massima qualità.



Grip ottimale




Maggiore resistenza alla corrosione



Superficie antibatterica



Realizzate per durare

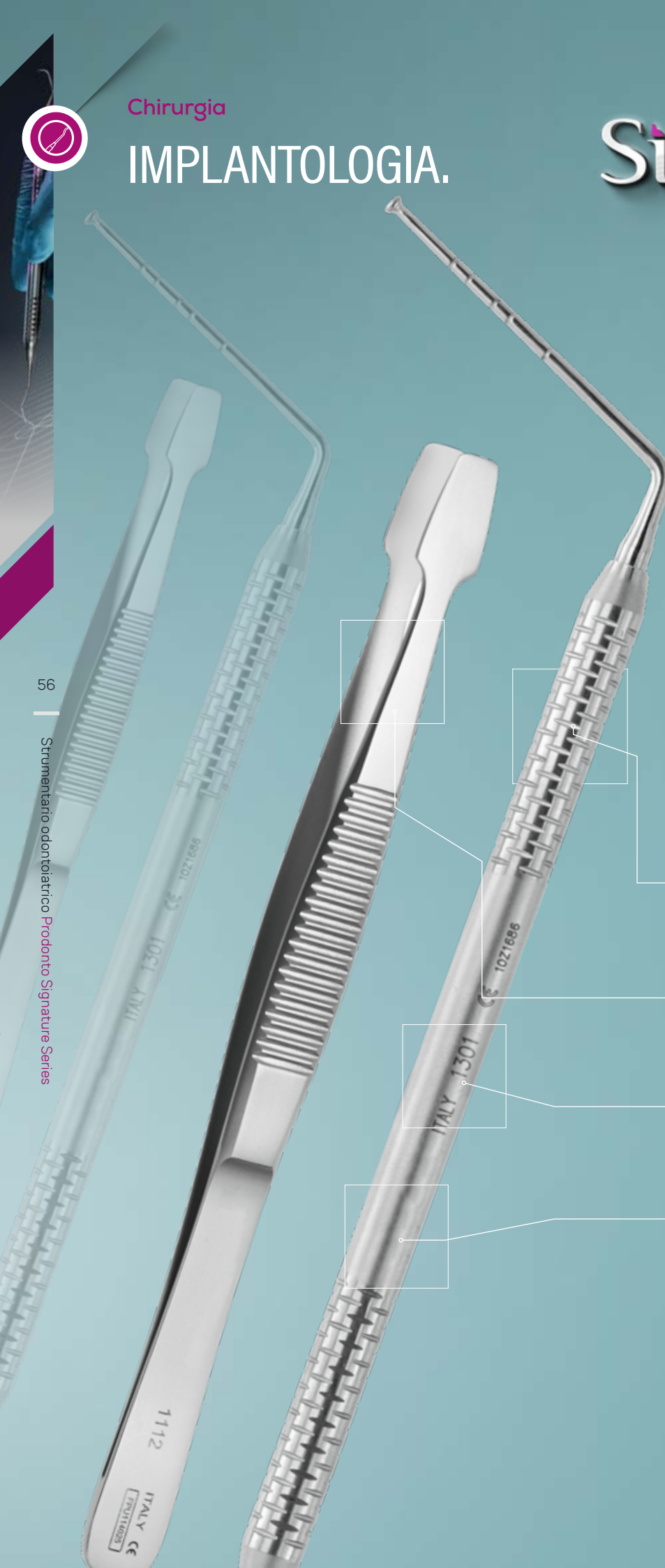



Implantologia

PINZETTE PER MEMBRANE.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROSH31112

PINZETTA PER MEMBRANE



PROSH31113

PINZETTA PER MEMBRANE CURVA



PROFONDIMETRO IMPLANTARE.



PROSH31301

PROFONDIMETRO IMPLANTARE

Profondimetro per tunnel osseo, utilizzato per le misurazioni a uso generico, sia in clinica o per altri scopi, per stabilire una misura accurata, ad esempio, diametro interno e esterno, lunghezza, profondità o spessore.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



GRATTINI PER OSSO.




Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROSH31325

Macinatore in puro Titanio (parti di ricambio a richiesta) usato per ricavare osso autologo. Grazie alla sua struttura permette di rimuovere l'osso per mezzo della lama affilata e raccoglierlo nell'apposito contenitore. L'utilizzo di osso autologo sarà poi immediato.

GRATTINO PER OSSO

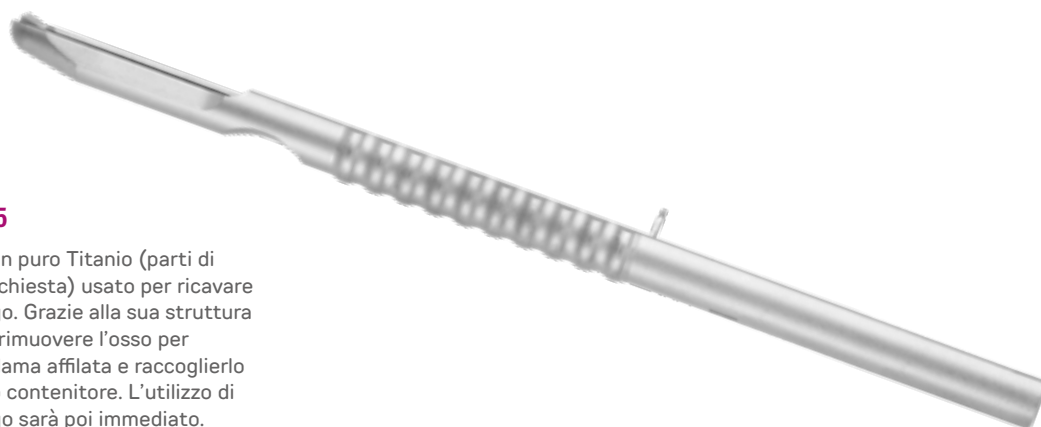

PROSH31325/LR

Lama per ricambio 31325



PROSH31325/A

Grattino usato per asportare osso autogeno al fine di ottenere un impasto o polvere da usare come matrice ossea per la rigenerazione ossea o innesto osseo.

GRATTINO PER OSSO CURVO



PROSH31325/LRA

Lama per ricambio 31325/LRA





Implantologia

CURETTES DI GRACEY.

Le curette di gracey sono le più diffuse ed apprezzate, in quanto meno traumatiche delle universali. Sono suddivise per tipologia di intervento: ogni modello è realizzato per effettuare un detartraggio su una zona specifica. La lama risulta orientata ed inclinata a seconda del modello ed affilata solo su un lato. Con uno spigolo più basso dell'altro, utilizzato a 70° rispetto alla superficie della radice del dente. Uso specifico: solo un lato di ciascuna punta (l'inferiore) può tagliare.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROSH3669/5-6Ti.HL8

Curette Gracey Short 5-6

Piega per denti anteriori e premolari curette adatte alla rimozione del tartaro sub-gengivale e la pulizia radicolare.

PROSH3669/7-8Ti.HL8

Curette Gracey Short 7-8

Premolari e molari superficie vestibolare e linguale curette adatte alla rimozione del tartaro sub-gengivale e la pulizia radicolare.

PROSH3669/11-12Ti.HL8

Curette Gracey Short 11-12

Per superficie mesiale dei denti posteriori curette adatte alla rimozione del tartaro sub-gengivale e la pulizia radicolare.

PROSH3669/13-14Ti.HL8

Curette Gracey Short 13-14

Per superficie distale dei denti posteriori curette adatte alla rimozione del tartaro sub-gengivale e la pulizia radicolare.

SCALER.

Per la rimozione del tartaro sopragengivale e placca dai denti. Gli scaler sono utilizzati al di sopra della linea gengivale, e le curette vengono utilizzate sotto di essa. L'utilizzo di uno scaler di sotto la linea gengivale può danneggiare la gengiva. Gli scaler hanno le estremità appuntite.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROSH3640/5Ti.HL8

Scaler 204 SD Titanio

SCOLLATORI ENDOSTALI.

Utilizzato per elevare e/o staccare il periostio (membrana di tessuto fibroso connettivo che circonda l'osso) dall'osso sottostante attraverso una azione di spinta di solito applicata lungo l'asse longitudinale dell'osso. disponibile in diverse forme e modelli di lama [ad esempio, fino o ampio, curvo, a forma di cucchiaio, piatto (a scalpello)].



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto





Chirurgia

RETRATTORI.


Divaricatore utilizzato per spostare i tessuti molli per migliorare la visione e l'accesso e a fornire protezione durante le procedure chirurgiche orali. La punta rivolta verso il basso permette un maggior controllo della tenuta, e nel contempo lascia maggior visuale per l'intervento. La forma scanalata e convessa della lama, permette un migliore appoggio al labbro e rende meno traumatica la tenuta.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



NEW

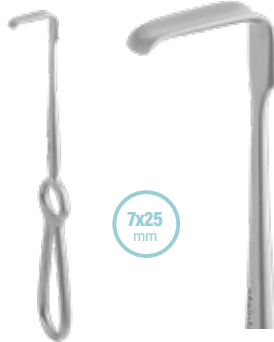

7x25 mm

PROSH3925/1

Retrattore Obwegeser n.1

NEW



10x35 mm

PROSH3925/2

Retrattore Obwegeser n.2

NEW



10x42 mm

PROSH3925/3

Retrattore Obwegeser n.3

NEW



12x55 mm

PROSH3925/4

Retrattore Obwegeser n.4

NEW



14x70 mm

PROSH3925/5

Retrattore Obwegeser n.5

RETRATTORE *MINNESOTA UNIVERSITY*

Divaricatore per guance utilizzato per spostare i tessuti molli per migliorare la visione e l'accesso e a fornire protezione durante le procedure chirurgiche orali.

NEW

PROSH3907

Retrattore *Minnesota University*




Chirurgia


SIRINGHE

Signature

Superfici lineari e levigate
per maggior comfort d'uso
e praticità di pulizia.

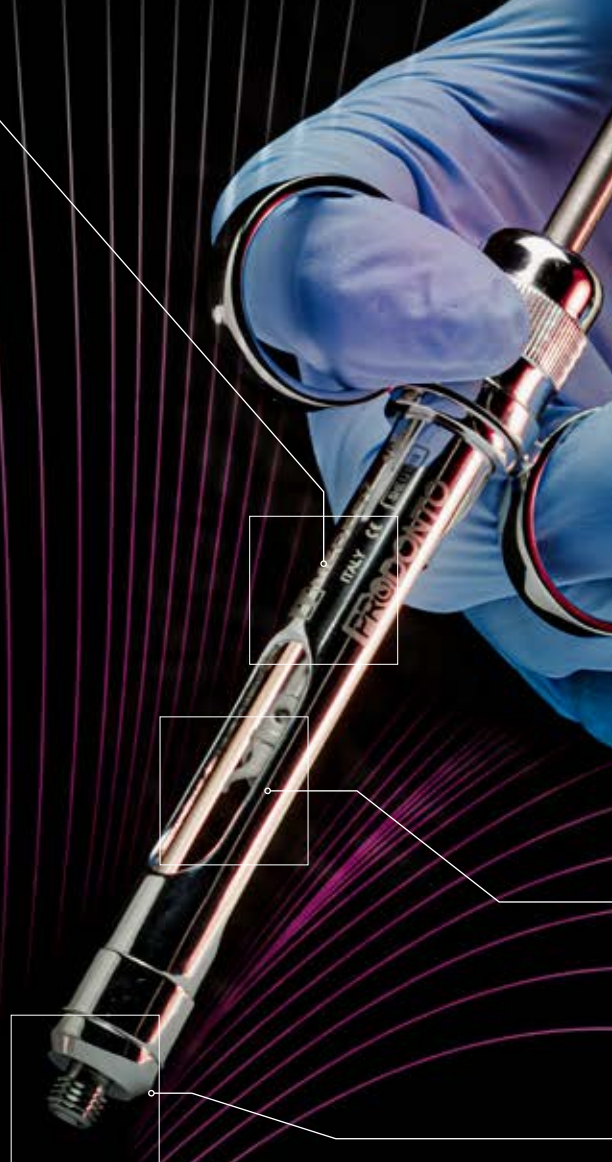

Innovativo arpione elicoidale,
ideato per agevolare l'aggancio
ed il rilascio del gommino carpule:
si aggancia avvitando in senso
orario, mentre si rilascia avvitando
in senso antiorario. *Brevettato.*

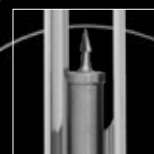

Puntali intercambiabili:
con filettatura Europea (metrica)
riconoscibili dal segno circolare

Chirurgia

SIRINGHE




Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PRODH4958/1

Siringa Cook-Waite 1,8 ml Eu

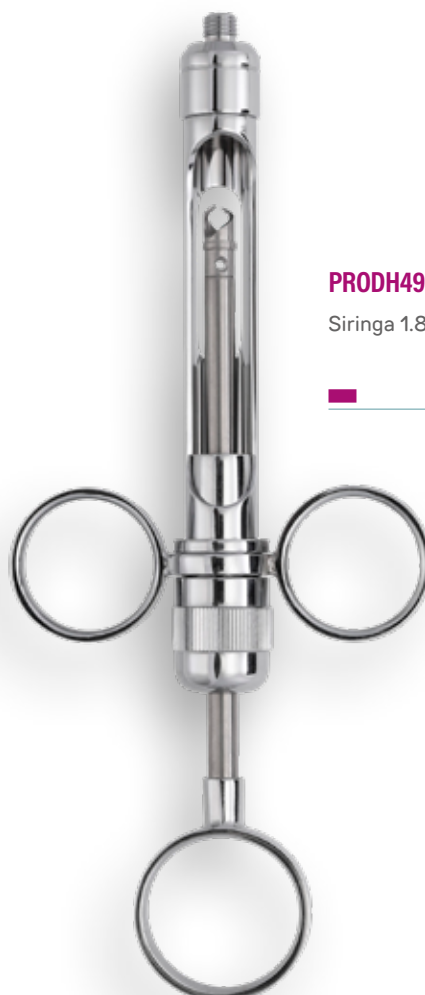

PRODH4960

Siringa 1.8 ml Eu/Am



PRODH4957/1


Siringa autoaspirante manico Teflon 1,8 ml Eu

Siringa auto-aspirante con manico in Teflon termoresistente. Il portafiala è in acciaio INOX di qualità superiore rifinito con un particolare trattamento superficiale che garantisce una disinfezione e una sterilizzazione più efficaci e sicure. Il nuovo design è concepito per assicurare un perfetto equilibrio delle parti durante l'uso e per garantire un maggiore controllo della forza di pressione sul pistone. Questa leggera pressione sullo stantuffo permette una corretta aspirazione automatica che, in assenza di ritrazione, minimizza il rischio di movimento della punta dell'ago nel tessuto. PUNTALE EUROPEO. Per la somministrazione locale di anestetico che utilizza una cartuccia preriempita e monta un ago sterile (non fornito).

Categoria
CHIRURGIA

Signature

La cura di ogni dettaglio è ciò che fa la differenza.
**Forme, materiali, tecnologia e cura nella costruzione
sono superiori per darvi i migliori strumenti .**

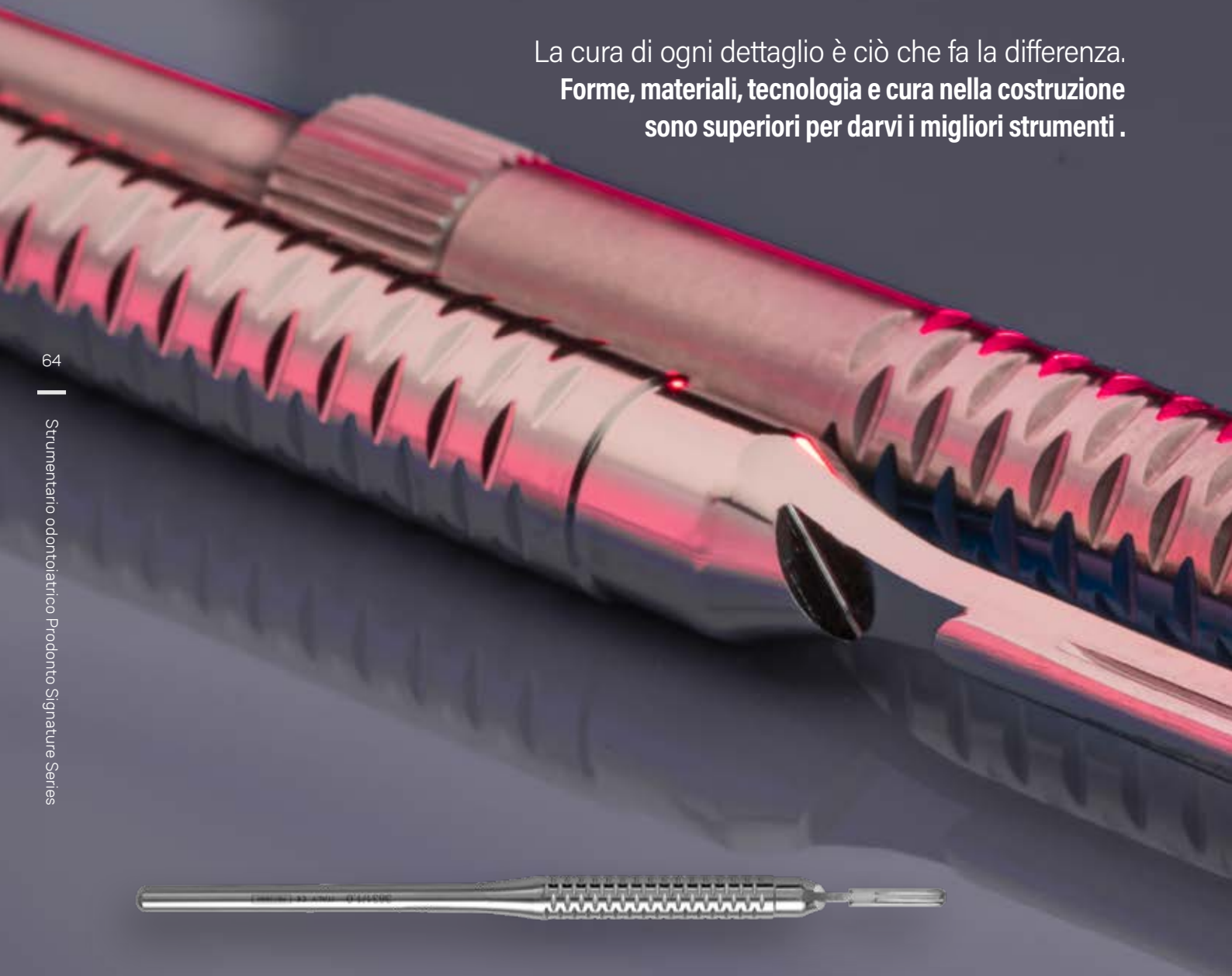

64

Strumentario odontoiatrico | Prodotto Signature Series


PORTALAME DOPPIO

Questi nuovissimi porta lame si differenziano da tutti gli altri disponibili a catalogo in quanto dotati di un doppio attacco per le lame. L'attacco a doppia lama permette di effettuare incisioni con la massima delicatezza, ottenendo delle dissezioni accurate e precise, così da poter prelevare porzioni di tessuto estremamente sottili delle dimensioni di 1 mm o di 1,5 mm. Come per gli altri strumenti Prodotto Signature, il design Dalila assicura una presa salda e allo stesso tempo estremamente confortevole, garantendo al professionista prestazioni di altissimo livello e risultati eccellenti in termini di disinfezione e sterilizzazione.



PORTALAME PER MICROLAME

Per le attività che richiedono una precisione superiore è possibile utilizzare i portalame speciali per microlame. Il Design ergonomico è concepito specificamente per garantire una presa più sicura e comoda. La vite di serraggio della lama è posizionata in posizione arretrata in modo da garantire la massima linearità sulla parte anteriore. L'impugnatura Dalila consente, come su molti altri strumenti della linea Prodonto Signature, di ottenere performance eccellenti di comfort e efficacia nella sterilizzazione.

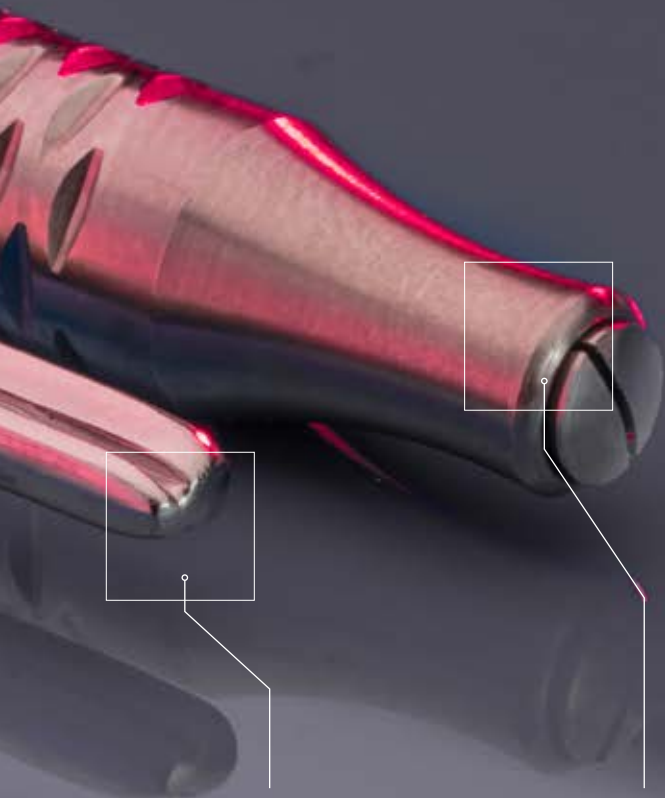


Singoli o doppi

Scegliete il portalame che preferite tra i modelli a singola lama o doppi.

Attacco per microlame

per operazioni di elevata precisione

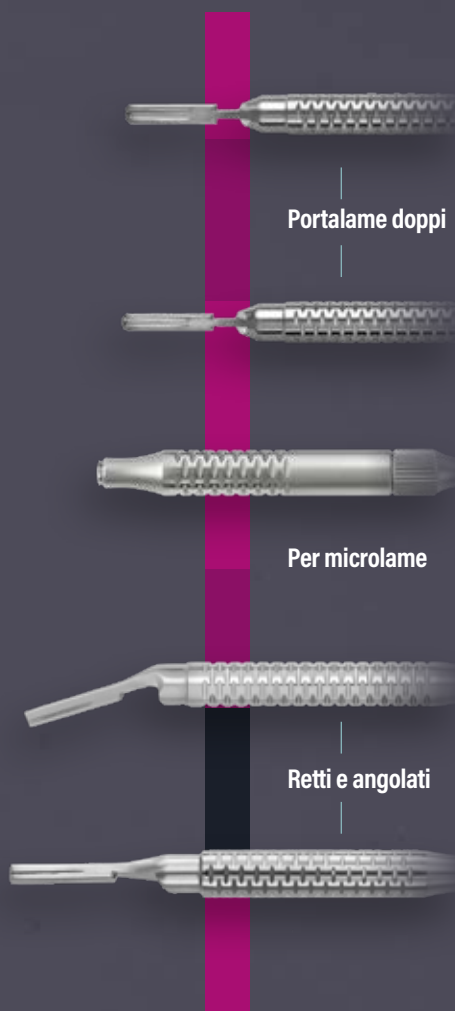

Portalame doppi

Per microlame

Retti e angolati

Questione di forma

Forma ed ergonomia del bisturi ottimali sono alla base del risultato clinico ottimale.

Chirurgia

PORTALAME.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PRODO3631

Porta Lama
145 mm

PRODO3632

Porta Lama
145 mm
CURVO

PRODO3638

Porta Lama
135 mm
MICRO

PRODO3631/15

Portalame doppio
per lame da 1,5 mm




Chirurgia

LAME BISTURI.

Confezione da 100 pz lame sterili per manici/bisturi di tipo n.3 (fitment no.3) lama diritta di forma triangolare con punta tagliente, schiena piatta parallela al manico. per piccole incisioni e tagli di precisione



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

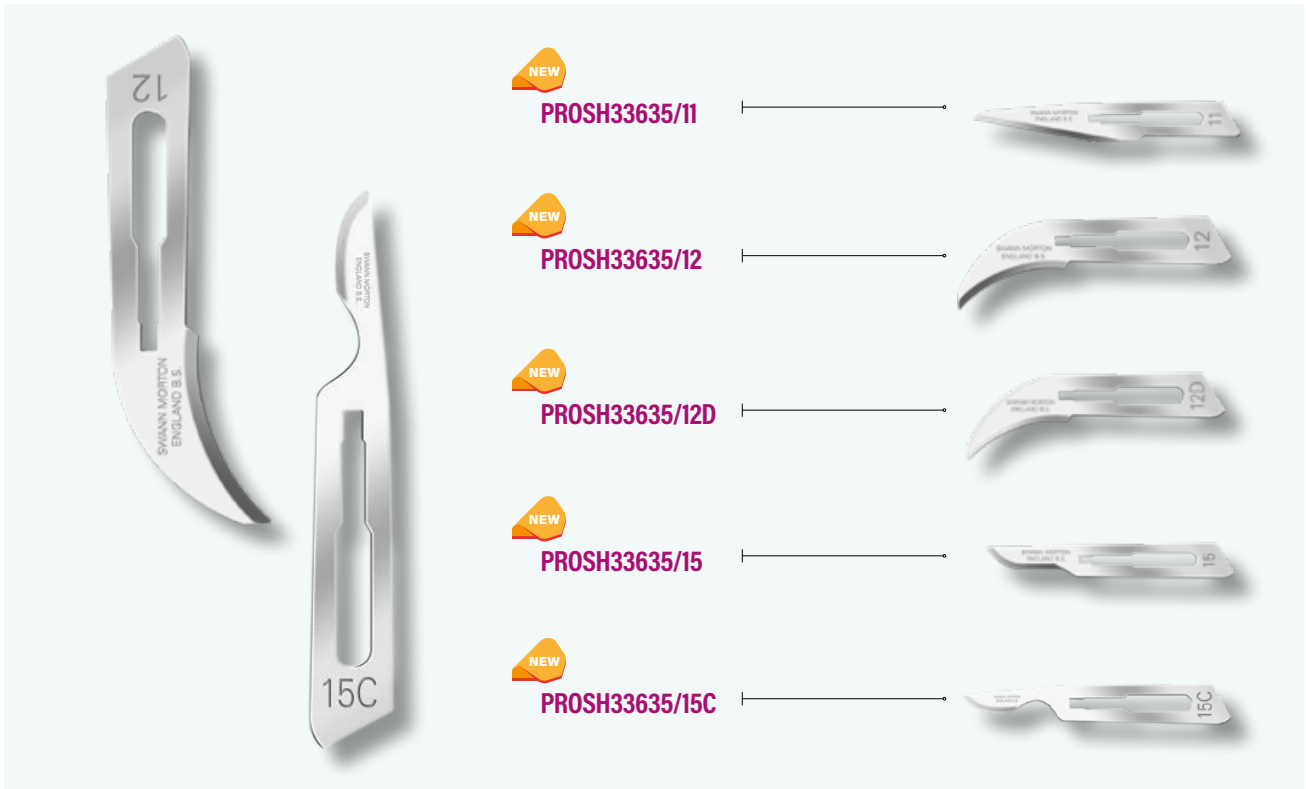

MICROLAME.

Confezione da 25 pz. lame sterili per microchirurgia



PROSH33638/64




PROSH33638/65



PROSH33638/67



PROSH33638/69

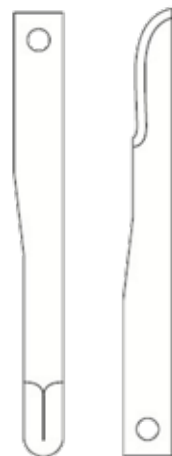

CUCCHIAI ALVEOLARI.



2,5
mm

PRODO660HL8/1

Cucchiaio Alveolare
Hemingway n.1
manico Ø 8 mm



3,0
mm

PRODO660HL8/2

Cucchiaio Alveolare
Hemingway n.2
manico Ø 8 mm



3,5
mm

PRODO660HL8/3

Cucchiaio Alveolare
Hemingway n.3
manico Ø 8 mm



4,0
mm

PRODO660HL8/4

Cucchiaio Alveolare
Hemingway 4n.
manico Ø 8 mm



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



2,5 mm

PRODO661HL8/85

Cucchiaio alveolare
Lucas
manico Ø 8 mm



3,0 mm

PRODO661HL8/86

Cucchiaio alveolare
Hemingway
manico Ø 8 mm



3,5 mm

PRODO661HL8/87

Cucchiaio alveolare
Lucas n.87
manico Ø 8 mm



4,0 mm

PRODO661HL8/88


Cucchiaio alveolare
Lucas n.88
manico Ø 8 mm

Chirurgia

PINZE OSSIVORE.




Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

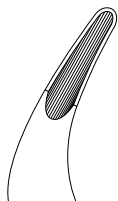

PROD03805

Pinza ossivora Luer

150 mm

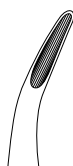

PROD03809

Pinza ossivora micro Friedman

150 mm





Chirurgia

LIME.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROD0898/1

Lima per osso
Miller-Colburn n.1
TAGLIO SINGOLO

n.1



PROD0898/3

Lima per osso
Miller-Colburn n.3
TAGLIO INCROCIATO

n.3




PORTAAGHI E PINZETTE *Signature*

Una scelta di qualità per ogni esigenza operativa

La cosa migliore è non dover modificare il proprio modo di lavorare in base agli strumenti, quanto piuttosto poter disporre degli strumenti giusti che valorizzano il nostro modo unico di lavorare. Per questo la gamma di pinzette e portaaghi Prodonto Signature Series è composta da una ricca selezione di forme, modelli e finiture che permettono al clinico e al proprio staff di lavorare come meglio credono e come meglio sanno fare. Ogni referenza in questa linea garantisce i massimi standard qualitativi secondo la filosofia Signature: finiture e materiali eccellenti per garantire prese sicure e la massima efficacia in ogni gesto.

Porta aghi
Crile-Wood e Mayo-Hegar

44

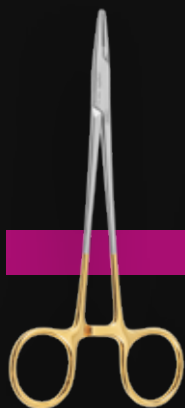

Porta aghi Mathieu
14mm

45



Porta aghi Castroviejo

45



Forbici
Metzenbaum

80



Pinza emostatica
Halstead-Mosquito


46



Pinzette chirurgiche

47





I vostri strumenti sono il mezzo attraverso il quale le vostre abilità, la vostra preparazione, il vostro talento, si trasformano in un risultato terapeutico. **Scegliete gli strumenti. Scegliete il risultato.**

Superfici lineari e levigate
per maggior comfort d'uso e praticità di pulizia.

Punti di presa ottimizzati
In base al tipo di strumento la zona di presa è studiata per offrire la migliore combinazione di sensibilità, precisione e stabilità nell'impugnatura.

PORTAAGHI.




Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



Inserti in Carburo di Tungsteno

I prodotti indicati con TC sono dotati di inserti al Carburo di Tungsteno per una sicura presa dell'ago. Zigrinatura di 0,4 mm per aghi sottili.

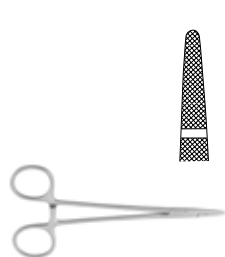


PROH31743

Porta aghi *Crile-Wood*

150 mm

☪ 3-0, 4-0, 5-0, 6-0

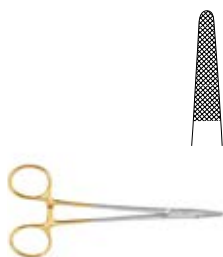


PROH31743/TC

Porta aghi *Crile-Wood TC*

150 mm

☪ 3-0, 4-0, 5-0, 6-0

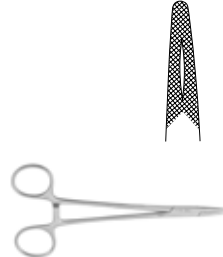


PROH31740

Porta aghi *Mayo-Hegar*

160 mm

☪ 2-0, 3-0, 4-0

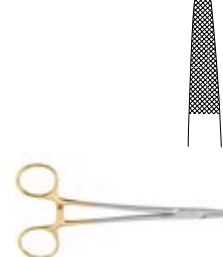

PROH31740/TC

Porta aghi *Mayo-Hegar*

TC 160 mm

☪ 2-0, 3-0, 4-0







Chirurgia

PORTAAGHI.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

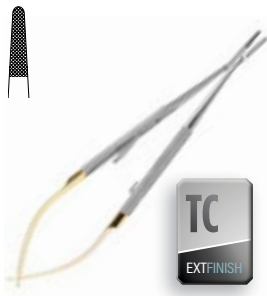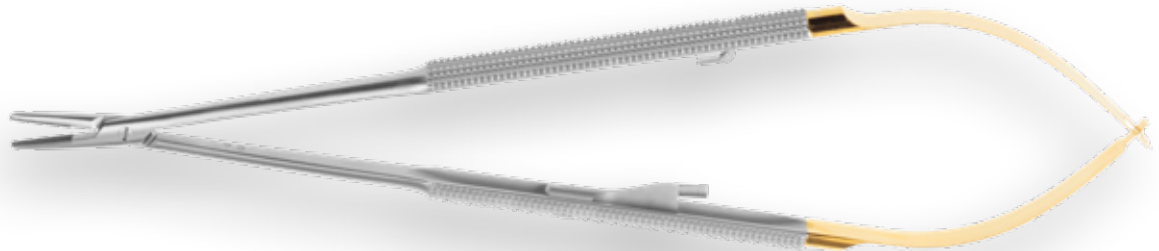


PROH31922/A-TC

Porta aghi
Castroviejo
TC 140 mm
4-0, 5-0, 6-0



PROSH31922/B-TC

Porta aghi
Castroviejo
TC 140 mm
4-0, 5-0, 6-0
CURVO

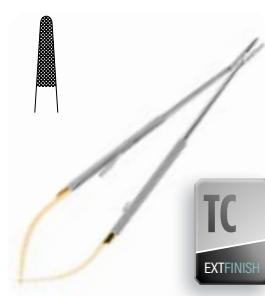


PROH31922/C-TC

Porta aghi
Castroviejo
TC 180 mm
4-0, 5-0, 6-0




PROSH31922/D-TC

Porta aghi
Castroviejo
TC 180 mm
4-0, 5-0, 6-0
CURVO

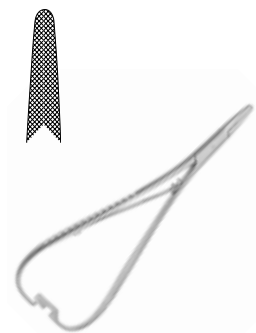


PROH31855

Porta aghi
Mathieu
140 mm
2-0, 3-0, 4-0

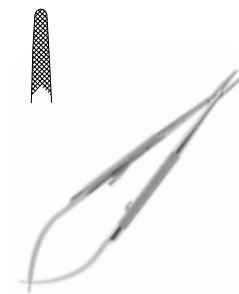

PROH31922/A

Porta aghi
Castroviejo
140 mm
4-0, 5-0, 6-0

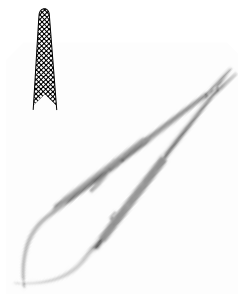

PROH31922/C

Porta aghi
Castroviejo
180 mm
4-0, 5-0, 6-0

PINZETTE EMOSTATICHE.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROH31519

Pinza
Halstead-Mosquito
125 mm



PROH31520

Pinza
Halstead-Mosquito
125 mm
CURVA



PROH31521

Pinza
Halstead-Mosquito
1X2 125 mm
RETTA



PROH31522

Pinza
Halstead-Mosquito
1X2 125 mm
CURVA



Chirurgia

PINZE CHIRURGICHE.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROD01017

Pinzetta Micro
Adson



PROD01012/OY

Pinzetta Micro
Adson Oy 1x2



PROD01027/120

Pinzetta *Taylor*
120 mm



PROD01031-06-OY

Pinzetta *Semken* 1x2

CURVA

Chirurgia

FORBICI HI-TECH.

Signature



Le forbici HI-TECH sono prodotte con finitura BLK: uno speciale trattamento superficiale (*DLC = Diamond Like Carbon*) che consente di ottenere caratteristiche uniche.



Affilatura e taglio

- Affilatura prolungata;
- Fluidità di taglio;
- Microdurezza superficiale elevata (2000 HV);



Maggiore resistenza alla corrosione



Superficie antibatterica



Riduzione della luce riflessa



Chirurgia

FORBICI HI-TECH.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROH33586/BLK

Forbici chirurgiche hi-tech 115 mm Black
CURVA



PROH33588/BLK

Forbici chirurgiche hi-tech 130 mm Black
CURVA





Chirurgia

FORBICI.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

Utilizzato per diversi scopi, come il taglio della gengiva, suture o garze. Con lame lisce o dentate e con punte sottile o smussate per specifici scopi chirurgici diversi.



PROSH33523

Forbici *Metzebaum*
MM.145



PROSH33525

Forbici *La Grange*
MM.115



PROSH33524

Forbici *Metzenbaum Curve*
MM.145





Chirurgia

FORBICI.




Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROSH3577
Forbici Standard
PUNTA CURVA
MM.140



Utilizzato per diversi scopi, come il taglio della gengiva, suture o garze. Con lame lisce o dentate e con punte sottile o smussate per specifici scopi chirurgici diversi.

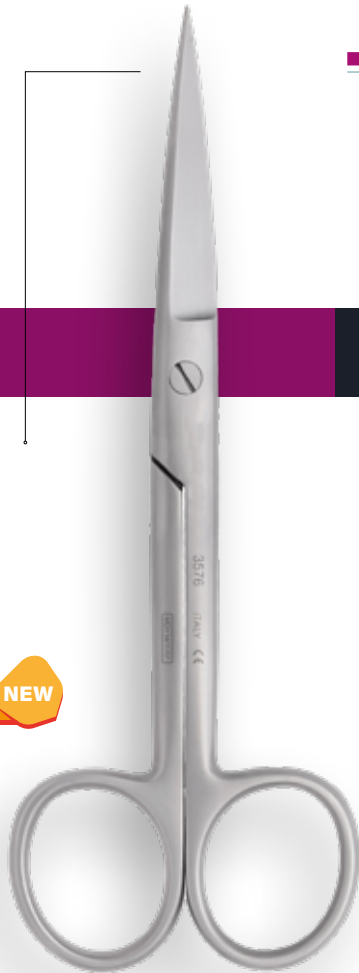

PROSH3576
Forbici Standard
MM.140



PROSH3521
Forbici Spencer per suture
MM.130



FORBICI.




Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROH33512

Forbici *Iris*
CURVA

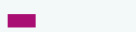

PROH33511

Forbici *Iris*
RETTA



PROH33518

Forbici *Goldman-Fox*
MICRO DENTATA, RETTA





Chirurgia

FORBICI.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROH33509

Forbici *Kelly*
RETTA



PROH33519

Forbici *Goldman-Fox*
MICRO DENTATA, CURVA




PROH33510

Forbici *Kelly*
CURVA


CURETTES DI GRACEY

Signature

Curette di livello superiore.

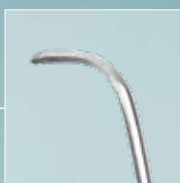

Migliore nell'eliminazione del tartaro e nello sbrigliamento parodontale e radicolare.

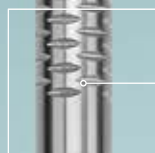


Maggiore efficienza.



Maggiore durezza.



- Le straordinarie caratteristiche di questa nuova curette assicurano la **MASSIMA EFFICIENZA** nelle pratiche dell'eliminazione del tartaro e dello sbrigliamento parodontale e radicolare.
- Una **NUOVA LEGA D'ACCIAIO** fa sì che la parte tagliente della curette rimanga affilata molto più a lungo; la necessità di riaffilare nuovamente le lame si riduce notevolmente, anche dopo un uso intensivo e prolungato!

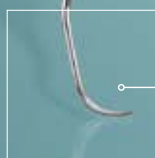

Affilatura singola



70° rispetto allo stelo



70°



CURETTE



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PRO0625HL8/12

Curette Gracey 1-2
ANTERIORE



PRO0625HL8/34

Curette Gracey 3-4
ANTERIORE



PRO0625HL8/56

Curette Gracey 5-6
ANTERIORE



PRO0625HL8/78

Curette Gracey 7-8
BUCCALE/LINGUALE



PRO0625HL8/910

Curette Gracey 9-10
BUCCALE/LINGUALE



PRO0625HL8/1112

Curette Gracey 11-12
**MESIALE/PREMOLARE/
MOLARE**



PRO0625HL8/1314

Curette Gracey 13-14
**DISTALE/PREMOLARE/
MOLARE**



PRO0625HL8/1516

Curette Gracey 15-16
**MESIALE/PREMOLARE/
MOLARE**

CURETTE YOUNGER-GOOD.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROSD0633/8.HL8

Curette younger-good 7/8

Per la rimozione del tartaro sub-gengivale e la pulizia radicolare. Le curette universali possono operare in tutte le aree della bocca con una punta semicircolare usata a 90° rispetto alla superficie radice del dente. Entrambi i lati di ogni lama può tagliare.



CURETTE COLUMBIA.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROSD0627/2.HL8

Curette columbia 2r/2l



PROSD0627/4.HL8

Curette columbia 4r/4l



PROSD0627/14.HL8

Curette columbia 13/14

Anteriori per la rimozione del tartaro sub-gengivale e la pulizia radicolare. Le curette universali possono operare in tutte le aree della bocca con una punta semicircolare usata a 90° rispetto alla superficie radice del dente. Entrambi i lati di ogni lama può tagliare.



Universale per la rimozione del tartaro sub-gengivale e la pulizia radicolare. Le curette universali possono operare in tutte le aree della bocca con una punta semicircolare usata a 90° rispetto alla superficie radice del dente. Entrambi i lati di ogni lama può tagliare.





STRUMENTO PER TUNNELLING



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

n.1

PROH3698HL8/1

Strumento per tunnelling n. 1



n.2

PROH3698HL8/2

Strumento per tunnelling n. 2



n.3

PROH3698HL8/3

Strumento per tunnelling n. 3



La *recessione gengivale* è definita come lo spostamento in senso apicale del margine gengivale dalla giunzione cemento-smalto.

È una situazione che ha un'alta incidenza nella popolazione e spesso crea grossi problemi di estetica, di sensibilità dentinale e/o di carie cervicali. Per alcuni casi specifici la *tecnica della tunnellazione* è considerata la tecnica più adeguata per la correzione dei difetti da recessione gengivale più complessi; un trattamento chirurgico che permette una gestione più facile

dell'innesto e che, nel contempo, risulta essere meno invasiva per il paziente. Prodonto offre una gamma di 3 strumenti con punta doppia che permette di rispondere perfettamente alle esigenze del professionista nell'eseguire la **TECNICA DELLA TUNNELLIZZAZIONE**.

- Punta affilata
- Punta sottili minimamente invasive
- Manico DALILA ø 8 mm

SCALER.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



Affilatura doppia

90°



90° rispetto allo stelo, a punta



n. 2/3



PROD0640HL8/13

Scaler *Taylor* n. 2/3

PROD0639HL8/23

Scaler Modello Svizzero Universale

POSTERIORE

PROD0651HL8/H5J33

Scaler *Hygenist-Jaquette* H5-J33

ANTERIORE

PROD0651HL8/11

Scaler *Hygenist* H6-H7

**ANTERIORE
UNIVERSALE E
PREMOLARE**



PROD0640HL8/1

Scaler 204 S
POSTERIORE

PROD0640HL8/5

Scaler 204 SD
POSTERIORE/DISTALE

PROD0640HL8/24

Scaler 204

PROSD0651/U15-30.HL8

Scaler U15 - J30

PROSD0651/31-32.HL8

SCALER J31-J32





Laboratorio

STRUMENTI PK.THOMAS M-ALLUMINIO



NEW PROSDR583/1AL



NEW PROSDR583/2AL



NEW PROSDR583/3AL



NEW PROSDR583/4AL



NEW PROSDR583/5AL



KIT STRUMENTI PK THOMAS

NEW PROSDR583/KIT.AL

Contiene/Contains:

- PROSDR583/1AL
- PROSDR583/2AL
- PROSDR583/3AL
- PROSDR583/4AL
- PROSDR583/5AL

SPATOLA PER CERAMICA.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

Spatola per ceramica Dr. Comella

La nuova spatola Prodonto Signature per la modellazione in laboratorio odontotecnico, realizzata in collaborazione con il dr. Fabrizio Comella, nata nella mano del giovane ceramista. la spatola F. Comella è molto pratica da utilizzare, leggera e maneggevole. L'impugnatura è studiata per garantire il massimo confort durante l'utilizzo. La sua lama estremamente flessibile la rende la miglior spatola in assoluto.



PROSDR572

Spatola per ceramica Dr.Comella

SPATOLE CEMENTO DOPPIE.

Utilizzato per cemento, in genere una lama smussata di forma e dimensione variabili.



PROD0675/1

Spatola cemento doppia n.1



PROD0675/2

Spatola cemento doppia n.2



PROD0675/3

Spatola cemento doppia n.3



Laboratorio

STRUMENTI PER CERAMICA GREENSTEIN.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

Utilizzato per ceramica, in genere una lama smussata di forma e dimensione variabili.



PROSDR575/1

ISO 40



PROSDR575/2

ISO 50



PROSDR575/3

ISO 60

Accessori

CASSETTE SGRFIX

Signature

LA NUOVA FRONTIERA
NELL'OTTIMIZZAZIONE DEL
LAVORO QUOTIDIANO


1



Componi il tuo kit ideale

Individua gli strumenti che utilizzi per ogni tipologia di trattamento

2

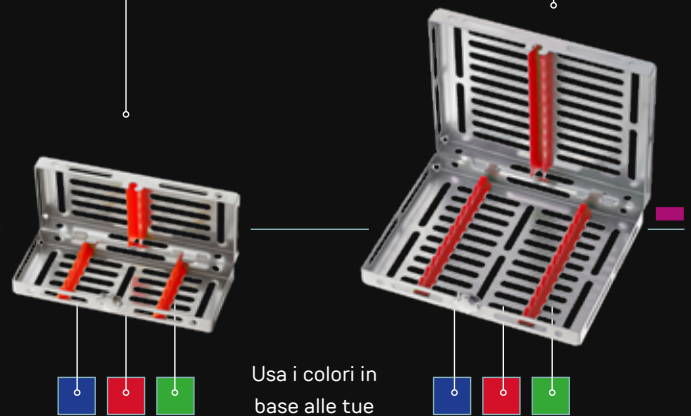

Scegli il contenitore SGRFix idoneo

Individua gli strumenti che utilizzi per ogni tipologia di trattamento

3

Rendi più rapido l'utilizzo

Quando usi gli strumenti saranno già selezionati e tutti in un'unica busta




4

Razionalizza spazi e tempi nella sterilizzazione


Dopo l'uso gli strumenti vengono riposti nella cassetta per ridurre i rischi di taglio, foratura e contaminazione. Alla fine basterà un solo imbustamento per tutto il kit.



Riduzione rischi di taglio, foratura e contaminazione

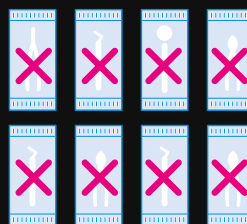

- Un solo imbustamento
- Un solo elemento da sterilizzare
- Una sola busta da stoccare

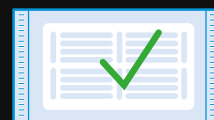




Accessori

CASSETTE SGRFIX



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

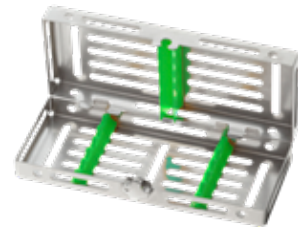

PROH3978BLUE

Cassetta SGRFix Blu
3/5 STRUMENTI

PROH3978RED

Cassetta SGRFix Rossa
3/5 STRUMENTI

PROH3978GREEN

Cassetta SGRFix Verde
3/5 STRUMENTI



PROH3980BLUE



Cassetta SGRFix Blu
7/10 STRUMENTI

PROH3980RED

Cassetta SGRFix Rossa
7/10 STRUMENTI

PROH3980GREEN

Cassetta SGRFix Verde
7/10 STRUMENTI

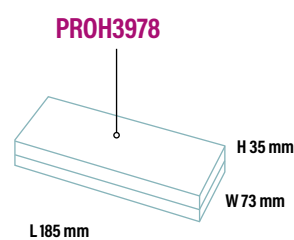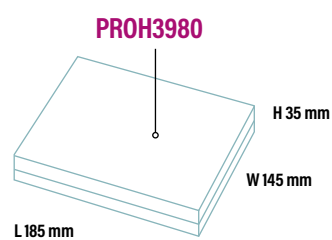

INDICE

A

Applicatore di sottofondo	28
---------------------------	----

C

Cassette SGRFix	56
Curette Columbia	86
Curette di Gracey	59
Curette di Gracey	85
Curette Younger-good	86
Cucchiari alveolari	68

D

Divaricatori	55
--------------	----

E

Escavatori	22
Escavatori endodontici	36

F

Forbici	80
Forbici hi-tech	79

G

Grattini per osso	58
Forbici hi-tech	48

K

Kit per Diga	29
Kit per Plugger	34
Kit per Spearer	35

L

Lame bisturi	67
Leve per radici categoria	67
Leve per radici categoria	26
Leve per radici	48
Leve per radici Bien	52
Leve per radici Cryer	52
Leve per radici curve	51
Leve per radici set 6 pezzi	50
Leve per radici lussatore	49
Leve per radici lusstaore set 6 pezzi	50
Leve per radici Coupland	53
Leve per radici Heidbink	54
Leve per radici Schmeckebier	53
Lime	71

M

Manici per specchietti	10
Martello leva corone	23
Microlame	67

O

Otturatori	24
------------	----

P

Pinza endodontica	37
Pinze	18
Pinze estrazione denti superiori	40
Pinze estrazione denti inferiori	41
Pinze estrazione Dr Comella	44
Pinze estrazione per frammenti	42
Pinze estrazione set 12 pezzi	42
Pinze ossivore	70
Pinzette emostatiche	76
Pinze chirurgiche	77
Pinze per corone universale	25
Pinzette medicazioni	16
Pinzette per membrane	57
Profondimetro implantare	57
Plugger endodontici	34
Portaaghi e pinzette chirurgia	42
Portaaghi Crilie-Wood	74
Portaaghi Mayo-Hegar	75
Portaaghi Castroviejo	45
Portaaghi Mathieu	45
Portalame	66
Portalame doppi	38

R



Retrattori	61
------------	----

S

Scaler	59
Scaler	88
Scollaperiostio	45
Scollatori endostali	60
Siringhe	63
Sonde parodontali	17
Sonde parodontali millimetriche	17
Spatola ceramica Dr. Comella	90
Spatole	26
Spatole cemento doppie	90
Specilli	18
Specilli doppi	19
Specchietti	11
Specchietti Dr. Comella	12
Specchietti micro	13
Strumenti per composito	27
Spreader endodontici	35
Spreader endodontici	35
Stecca endodontica	37
Strumenti ceramica Greenstein	91
Strumenti Pk.Thomas M-Alluminio	89
Strumenti per tunnelling	87
Strumento filo retrattore universale	28
Strumenti filo retrattore tondo	28

U

Uncini per diga	30
-----------------	----

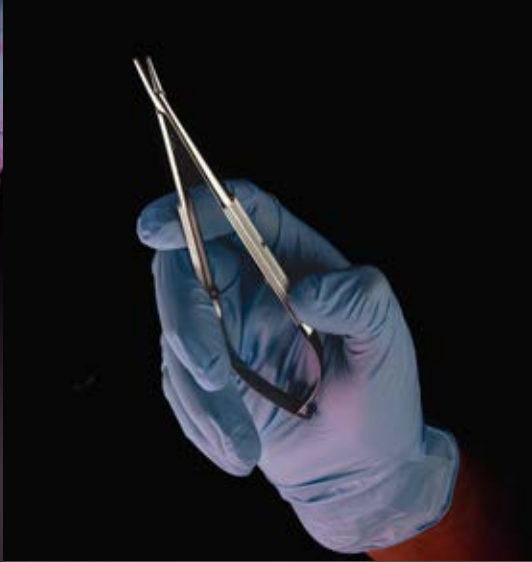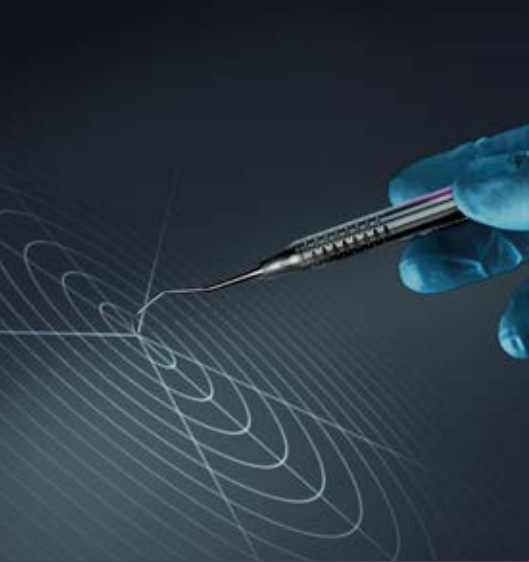

PRODONTO

Signature

prodonto.it/signature



OGGETTI PERFETTI
GESTI PERFETTI
RISULTATI PERFETTI



Resta sempre aggiornato
sulle ultime novità
Prodonto Signature con il
QR Code qui a fianco



Vol. 2


Edizione 09.22

IT

L'ECCELLENZA QUOTIDIANA PER L'ODONTOIATRIA

Per **costruire l'eccellenza** del risultato
terapeutico ad ogni gesto


Signature

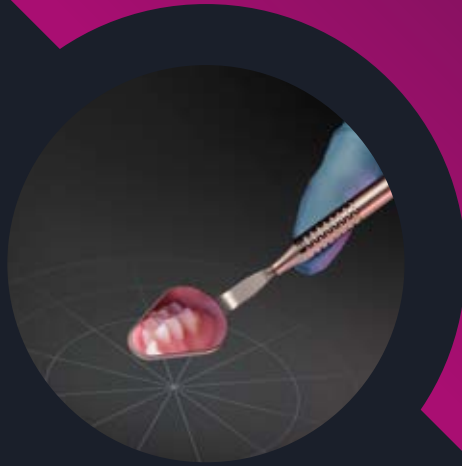

PRODONTO

PRODONTO è distribuito in
esclusiva da Astidental S.p.A.

Via del Lavoro, 9 - 14100 Asti
info@prodonto.it

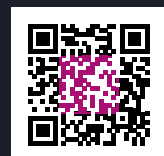

www.prodonto.it/signature

STRUMENTARIO ODONTOIATRICO DI ALTA QUALITÀ

Edizione 22.09.02